ALFALASTIC PULSO ELASTICO AJUSTÁVEL MQ120 T.UNICO G Geri Mais

Finalidade:

Ortótese de Pulso. Incorpora uma cinta elástica para fácil ajuste. Bilateral. Feito de tecido elástico respirável.

Efeitos: Estabilização e apoio para a articulação do pulso, Estimula a propriocepção, Compressão.

Indicações: Traumatismo articular, Tendinite, Distensão do pulso, Proteção durante atividades físicas que exijam esforço para a articulação do pulso.

Características:

Feito de tecido elástico respirável, aumenta a sensação de conforto durante o seu uso. Suporte de pulso com alças elásticas e ajuste de velcro.

Tecido de malha: Poliamida: 70%, Elastano: 30% Tecido interior: Algodão: 70%, Poliéster: 30%

Dimensões: Tamanho único

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Modelo: MQ120

Marca: Alfalástica

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante: Camino de La Pascualeta, 40 46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave periodicamente com água morna (máximo 30º), sabão neutro e deixe secar ao ar. Durante a lavagem, os velcros devem ser colados ou mantidos fechados. Não exponha a fontes diretas de calor, como superfícies quentes, luz solar direta e outras fontes de ignição.

Instruções de utilização:

Inserir a ortótese no pulso e ajuste a mesma com a ajuda dos velcros. Para que o artigo mantenha suas propriedades de compressão, a ortótese deve adaptarse à área afetada sem causar desconforto ou incômodo durante o uso.

Indicações: Traumatismo articular, Tendinite, Distensão do pulso, Proteção durante atividades físicas que exijam esforço para a articulação do pulso.



Imagens do Artigo:



