

Finalidade:

Ortótese de Pulso Metacarpiano. Incorpora uma cinta elástica para fácil ajuste. Bilateral.

Efeitos: Estabilização e apoio para a articulação do pulso, Estimula a propriocepção, Compressão.

Indicações: Traumatismo articular ligeiro, Tendinite, Entorses, Osteoartrite, Dores Reumáticas e Infamações agudas e crónicas do pulso e das articulações carpo metacarpianas.

Características:

Feito de tecido elástico respirável, aumenta a sensação de conforto durante o seu uso. Punho com alça elástica e ajuste de velcro. Cobre o punho e a articulação carpo metacarpal. Tecido de malha: Poliamida: 70%, Elastano: 30% - Tecido interior: Algodão: 70%, Poliéster: 30%

Dimensões: T.S.; T.M; T.L.

Contorno do Pulso: S (14-16cm); M (16-19cm); L (1-22cm)

Cor: Preto

Lote e Data de Produção : Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ116

Marca: Alfalastic

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

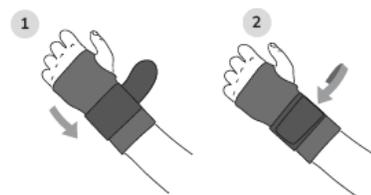
Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave periodicamente com água morna (máximo 30º), sabão neutro e deixe secar ao ar. Durante a lavagem, os velcros devem ser colados ou mantidos fechados. Não exponha a fontes diretas de calor, como superfícies quentes, luz solar direta e outras fontes de ignição.

Instruções de utilização:

Inserir a ortótese no pulso e dedo polegar e ajuste a mesma com a ajuda dos velcros. Para que o artigo mantenha suas propriedades de compressão, a ortótese deve adaptar-se à área afetada sem causar desconforto ou incômodo durante o uso.

**Imagens do Artigo:**