

Finalidade:

Estabilizador de tornozelo infantil para proteção e mobilidade, cobrindo todas as necessidades específicas dos mais pequenos, para que possam recuperar e continuar com as suas atividades. Tecido elástico e respirável. Incorpora uma cinta elástica de fixação que permite a aplicação de uma ligadura estabilizadora. Indicado para: Treino, Tendinites, Prevenção da recorrência de entorses. Efeitos: Ajustável suporte de articulação através de uma cinta elástica, Compressão, Calor terapêutico, Melhoramento da propriocepção.

Características:

Sem Latex, bastante confortável. Tecido com uma elasticidade alta, que permite uma adaptação perfeita ao paciente. Tecido respirável, permite a circulação de ar e previne a humidade na pele.

Dimensões: Circunferência do tornozelo em cm:
XS (18-20cm), S (21-24cm)

Cor: Preto

Lote e Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: KTB461

Marca: KIDS

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,
Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave periodicamente com água morna (máximo 30º), sabão neutro e deixe secar ao ar. Durante a lavagem, colar os velcros e mantê-los fechados. Não exponha a fontes diretas de calor, como superfícies quentes, luz solar direta e outras fontes de ignição. O contato com pomadas, cremes, álcoois e solventes pode danificar o artigo. Armazenar o produto à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Posicionar o tornozelo numa posição neutra de 90º e fixar o Velcro. Indicado para: Treino, Tendinites, Prevenção da recorrência de entorses. Efeitos: Ajustável suporte de articulação através de uma cinta elástica, Compressão, Calor terapêutico, Melhoramento da propriocepção.

**Imagens do Artigo:**