

Finalidade: Consiste num gerador de impulsos elétricos alimentado por bateria que envia impulsos elétricos para o corpo até atingir os nervos e tecidos musculares subjacentes;

Características: Existem 3 modalidades de terapia e 9 partes a serem tratadas, cada parte a ser tratada tem 3 ou 4 programas em uma modalidade terapêutica;

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Branco;

Caixa: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe IIa;

Modelo: LTK545;

Marca: Kyara (Moretti);

Dimensões: 117x60x25mm;

Fabricante: Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.;

Morada do fabricante: No. 3 Building XiliBaimang Xusheng Industrial Estate 518108 Nanshan, Shenzhen China;

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: - Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

- 1) Antes de limpar, remova sempre as baterias do dispositivo;
- 2) Limpe o aparelho com um pano macio e levemente húmido. Em caso de sujeira mais persistente, o pano também pode ser umedecido com água e um pouco de sabão neutro;
- 3) Não use agentes químicos de limpeza ou agentes abrasivos para limpeza;

Instruções de Utilização:

1. O eletrostimulador tem dois canais. Antes de conectar os fios ao dispositivo, certifique-se de que o dispositivo está completamente off;
2. Pegue a entrada do cabo e insira-o na entrada na parte superior do dispositivo.

Imagens do Artigo:

