

Finalidade: Facilitar/Permitir a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção. Pode ser utilizada por condução autónoma ou com a ajuda de outra pessoa.;

Características: Estrutura em aço.

Assento em nylon.

Rodas dianteiras: PVC;

Rodas traseiras: PU sem câmara de ar; rodas traseiras: pu sem câmara de ar.

CP100-40 – 40cm largura do assento;

CP100-43 – 43cm largura do assento;

CP100-45 – 45cm largura do assento;

CP100-48 – 48cm largura do assento;

Peso máximo de suportado: 120kg;

Armazenamento: Guardar num local seco, longe de fontes diretas de calor, como a luz solar.

Temperatura recomendada: entre +10 C° / + 40 C°.

Marca: Ardea (Moretti);

Modelo: CP100-xx;

Caixa: 1 Unidade;

Cor: Estrutura em Azul;

Diretiva 93/42/CEE;

Tipo de Utilizador: Pessoas com Mobilidade Reduzida;

N.º de Série e Lote: Descritos na Etiqueta existente no artigo;

Fabricante: Moretti S. P. A. (Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11);

Distribuidor: Gerimais;

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção: O estofos, partes metálicas e as rodas podem ser limpos com água e sabão neutro, depois secar com um pano macio para não riscar a pintura da armação.

Atenção à secagem das rodas, pode ser perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda húmidas.

Nota: Evite utilizar produtos ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona ou diluente.

Instruções de Utilização:

Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado;

Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar a subida para a cadeira de rodas;

É aconselhável remover o apoio de braços do lado onde estas operações são realizadas;

Apoie-se na estrutura do quadro fazendo força nos braços, em seguida, desça lentamente em direção ao assento.

Imagens do Artigo e Embalagem:

