

Finalidade:

Ortose Semirrígida Sacrolombar indicado para: Dor Lombossacral aguda e subaguda Síndrome de Facet. Saliência discal. Hérnia de disco. Espondilose. Doença degenerativa do disco. Hipotonia muscular. Reabilitação postural. Pós operatório.

Efeitos: Grande contacto. Apoio lombossacral, descarregamento da coluna lombossacral, limitação da mobilidade da coluna. Compressão infra abdominal.

Características:

Tecido Semi-Elástico, respirável de algodão e lycra. Peça de reforço elástico Lumbo-Sacral.

Dois pares de Abas de Tracção Inelástica para ajustamento a dois níveis: Anca e Cintura nos dois lados. Ajuste eficaz: As suas correias deslizantes multiplicam a força de tracção exercida pelo paciente. Quatro cintas de aço adaptáveis na área Lombo-Sacral. Presilhas largas para facilitar a colocação e fecho em velcro.

Dimensões:

S (85-95 CM) , M (95-105 CM) , L (105-115 CM) , XL (115-125 CM) , XXL (125-135 CM).

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: LS601

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Païporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem com água quente (30º máximo), e sabão neutro. Durante a lavagem deve-se manter os velcros fechados. Secar á temperatura ambiente. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça vestuário. Armazenar á temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Colocar a faixa na área lombo-sacra na altura correta para uso. Ajuda de pinos para os dedos, para apertar a peça sobre o abdómen com bandas laterais soltas. Fechar a faixa com velcro, uma vez obtida a compressão desejada. Em seguida, ajuste o nível, puxando primeiro hip extratores. Regular o apoio de descarga e lombar, usando o lado e corriji-los sobre sobre as faixas abdominais.

Imagens do Artigo: