



**REF. 812176 – 812274 - 812275**



**SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO**  
**SYMBOLE AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG**  
**SYMBOLLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING**  
**ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
**SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Endereço do fabricante<br>Indirizzo del fabbricante<br>Adresse des herstellere<br>Adres van de fabrikant<br>Διεύθυνση του κατασκευαστή<br>Adres producenta              |    | Convite para ler o manual de instruções<br>Invito a leggere il manuale d'uso<br>Aufforderung zur leseanleitung<br>Uitnodiging om de gebruiksaanwijzing te lezen<br>Πρόσκληση για ανάγνωση των οδηγιών χρήσης<br>Zaproszenie do przeczytania instrukcji użytkowania |
|    | Data de fabricação<br>Data di fabbricazione<br>Herstellungsdatum<br>Productiedatum<br>Ημερομηνία κατασκευής<br>Data produkcji                                           |    | Respeitar as instruções de segurança<br>Rispettare le istruzioni di sicurezza<br>Sicherheitsanweisungen beachten<br>De veiligheidsvoorschriften naleven<br>Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας<br>Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa                                     |
|    | Número do lote<br>Numero di lotto<br>Chargennummer<br>Partijnummer<br>Αριθμός παρτίδας<br>Numer partii                                                                  |    | Conformidade CE<br>Conformità CE<br>CE-Konformität<br>CE-conformiteit<br>Συμμόρφωση CE<br>Zgodność CE                                                                                                                                                              |
|  | Referência do produto<br>Riferimento del prodotto<br>Produktreferenz<br>Productreferentie<br>Αναφορά προϊόντος<br>Numer referencyjny produktu                           |  | Dispositivo médico<br>Dispositivo medico<br>Medizinprodukt<br>Medisch hulpmiddel<br>Ιατρική συσκευή<br>Wyrób medyczny                                                                                                                                              |
|  | Peso máximo do utilizador<br>Peso massimo dell'utente<br>Maximales Benutzergewicht<br>Maximaal gebruikersgewicht<br>Μέγιστο βάρος χρήστη<br>Maksymalna waga użytkownika |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## IMPORTANTE

Leia atentamente o manual antes de utilizar este produto e conserve-o para referência futura, se necessário.

Usuário: Se você não conseguir ler ou entender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto, pois o uso inadequado pode causar riscos e danos físicos.

Consulte seu médico ou especialista em saúde antes de utilizar um dispositivo de auxílio técnico. Ele poderá aconselhá-lo e informá-lo sobre a utilização mais adequada ao seu caso.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

## DESTINO DO PRODUTO

As pranchas de banho Java são dispositivos de assistência técnica. Estes produtos destinam-se a ser utilizados por pessoas idosas ou com deficiência para a sua higiene pessoal e para tomar banho, sentadas confortavelmente nas bordas da banheira.

Para facilitar a transferência e aumentar a segurança, este modelo de prancha de banho em plástico vem equipado com uma pega.

Oferece uma área de assento confortável e ergonômica para se sentar durante o banho e contém orifícios bem espaçados para uma melhor drenagem.

## PRECAUÇÕES DE USO



O não cumprimento das precauções pode resultar em ferimentos graves.

- Leia atentamente este documento antes de usar. O não cumprimento desta instrução pode causar ferimentos graves.
- Não exceder o limite de peso permitido de 113 kg.
- Inspeccione todas as peças antes da montagem para garantir que não foram danificadas durante o transporte. Se houver danos devido ao transporte – NÃO UTILIZAR. Entre em contato com o revendedor para mais instruções.
- Antes do uso, verifique se os parafusos estão bem apertados e se o produto está estável.
- Certifique-se de que todas as conexões estão bem ajustadas antes do uso.
- Sempre sente-se no centro da prancha de banho e evite apoiar-se na borda do assento, pois isso pode causar instabilidade. NÃO fique de pé sobre o produto.
- Se houver peças danificadas, quebradas, gastas ou em falta, entre em contato com o revendedor.

## USO

1. Afrouxe os suportes inferiores na parte inferior do produto girando no sentido anti-horário. Isso libera o suporte de ajuste para permitir a adaptação a diferentes tamanhos de banheiras. Inverta esta ação para apertar.

2. Deslize os suportes até que fiquem centralizados na prancha e posicione-a na banheira, garantindo que há largura suficiente para um apoio seguro nas bordas (ver FIG 1)

### AVISO

Para evitar riscos de tombamento, certifique-se de que os parafusos antiderrapantes estejam bem fixos para ajuste de altura (**ver FIG 2**).

3. Mova os ganchos para fora até que fiquem firmemente posicionados na borda da banheira dos dois lados. Aperte os parafusos para fixar.

4. Verifique se a prancha está bem fixada e estável antes de usá-la.

5. Este procedimento de montagem deve ser realizado sempre que a prancha for colocada na banheira para garantir um posicionamento seguro.

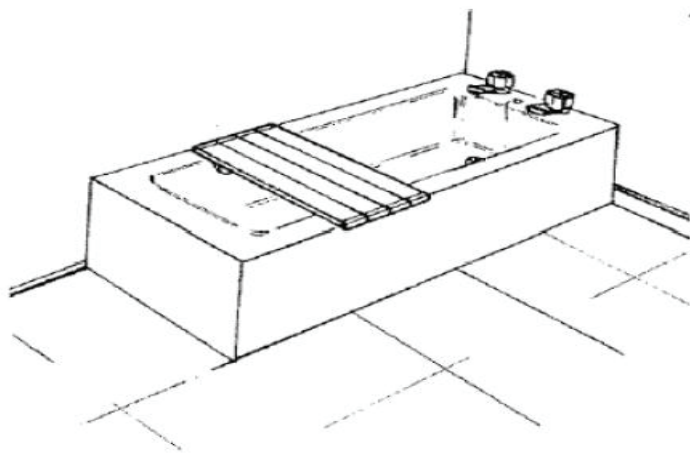


FIG.1

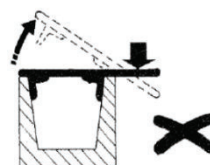


FIG. 2

Nota: O assento giratório 812275 pode ser instalado nas pranchas de banho Java e Java Plus, facilitando a entrada e saída da banheira.

## MANUTENÇÃO E CUIDADOS



A falta de manutenção pode causar ferimentos graves.

- Seque o produto após cada uso.
- Limpe periodicamente com um pano úmido e um detergente ou desinfetante suave. Por exemplo, pode ser usado um desinfetante suave à base de cloro. Enxágue com água morna após a limpeza. Não use pós abrasivos ou esponjas ásperas.
- Verifique se há rachaduras ou danos no produto.
- Em caso de defeito, não tente consertá-lo sozinho. Consulte um revendedor autorizado.
- Lista de verificação :

Para manter o produto em bom estado, verifique antes de cada utilização e regularmente conforme indicado abaixo :

| Verificar o item                                                                   | A qualquer momento | Semanalmente |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Verifique se os parafusos antiderrapantes estão bem fixos para o ajuste de altura. | X                  |              |
| Verifique o estado da prancha e da alça.                                           |                    | X            |
| Verifique se os suportes estão totalmente fixados nas bordas da banheira.          | X                  |              |

## MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado, mas deve ser previamente limpo e desinfetado, respeitando as normas de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. Antes disso, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto não puder mais ser utilizado e precisar ser descartado, entre em contato com o revendedor especializado. Se desejar realizar o descarte por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para obter as diretrizes corretas de eliminação.

## ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode causar a deterioração do produto e, consequentemente, riscos de lesões graves.

Não armazene o produto por um longo período perto de uma fonte de calor ou exposto ao sol (ex.: atrás de uma janela ou próximo a um radiador) ou perto de uma fonte de frio.

Mantenha-o afastado de chamas e faíscas.

Respeite as condições adequadas para armazenamento e conservação do produto:

- Em um local seco e com temperatura amena.
- Proteja o produto contra poeira e corrosão (ex.: elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salino)
- Armazene todas as peças retiradas juntas no mesmo local (ou identifique-as, se necessário) para evitar misturá-las com outras peças durante a remontagem
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos pesados sobre os elementos do produto, não prenda nada entre eles).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

812176 :

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Dimensões                   | Comprimento 70 cm x Largura 26/30 cm |
| Ajuste interno dos suportes | 40,5/65 cm                           |
| Peso da prancha             | 2,1 kg                               |
| Peso máximo do usuário      | 113 kg                               |

812274 :

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Dimensões                   | Comprimento 75,5 cm x Largura 26,5/35 cm |
| Ajuste interno dos suportes | 45,5/68 cm                               |
| Peso da prancha             | 2,3 kg                                   |
| Peso máximo do usuário      | 113 kg                                   |

812275 : Diâmetro 31,5 cm

## DURAÇÃO DE USO


A vida útil prevista deste produto é de 5 anos, desde que utilizado em condições normais de uso, segurança e manutenção. Após esse período, o produto pode continuar sendo utilizado, desde que permaneça em boas condições.

## GARANTIA

Este produto possui uma garantia de 2 anos a partir da data de compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente quebrado devido a um defeito de fabricação, design ou material. Caso precise acionar a garantia, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto. Falhas decorrentes de danos acidentais, uso indevido, modificações ou desgaste natural não estão cobertas pela garantia. Para qualquer solicitação de garantia, entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado.



*Identités – ZA Pole 49*  
*Bd de la Chanterie*  
*49124 Saint Barthélemy d'ANJOU*

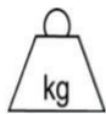

**Peso máximo permitido: 113 kg**  
**Peso massimo consentito: 113 kg**  
**Zulässiges Höchstgewicht: 113 kg**  
**Maximaal toegestaan gewicht: 113 kg**  
**Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 113 κιλά**  
**Maksymalna dozwolona waga: 113 kg**

