

Finalidade (Indicações):

Arnês torácico indicado para Displasia da anca, Subluxações, ancas deslocáveis ou instáveis nos primeiros meses de vida do bebé, Luxação congénita da anca quando não existe um grau de instabilidade significativo.

Mantém a cabeça do fémur centrada dentro do acetábulo, em 60° de abdução e 90° de flexão, favorecendo o normal desenvolvimento ósseo. A posição de flexão, abdução e rotação externa aumenta a cobertura do acetábulo sobre a cabeça do fémur, permitindo uma maior estabilidade e congruência.

Características

Arnês torácico em tecido e espuma macia. Cintas forradas com tecido e algodão laminado. Fivelas extra planas de libertação rápida. Botas ajustáveis com velcro.

Dimensões: (contorno do tórax)

XS (28-33cm)

S (33-41 cm)

M (41-51 cm)

L (51-60 cm)

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: HIP100

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água morna (máximo 30 graus) e sabão neutro. Durante a lavagem, deve manter os velcros juntos ou mantê-los fechado. Secar á temperatura ambiente. Não utilizar o ferro. Contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de roupa.

Instruções de utilização:

A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil do artigo.

O artigo deve ser ajustado pelo protesista ou o médico individualmente para cada paciente.

Coloque a cinta na altura do peito e mantê-lo a essa altura com as alças. Coloque as cintas anteriores , mantendo o quadril flexionado e fixo. Ajuste as restantes cintas.

Imagens do Artigo:

