

Finalidade:

Joelheira pediátrica estabilizadora envolvente com buraco para apoio da rótula, evitando a pressão e facilita a flexão e a extensão. Contém apoios laterais em espiral. As cintas elásticas permitem a regulação da compressão na perna. É muito fácil de colocar, controlar e verificar a zona afetada.

Características:

Tala estabilizadora do joelho com velcro.

Apoio lateral em espiral. Cintas elásticas com velcro para regular a compressão. Zona poplíteia aberta.

Material respirável e elástico.

Dimensões: Altura de 19cm

Cor: Cinza e verde

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: KRD461

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Marca: EMO

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave manualmente em água morna com detergente neutro (máximo 30°). Seque ao ar livre antes de usar. Manter longe da luz solar. O contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes pode danificar o artigo. Não utilize branqueadores nem lave a seco. Para armazenar, garanta que está completamente seca e limpa dentro da embalagem original.

Instruções de utilização:

A joelheira é recomendada para casos de entorse do joelho e/ou tendinites.

Adapte o artigo à morfologia do paciente. Coloque a ortótese sobre a área correta para uso. Use as tiras de velcro para fechar e ajustar. Abrir todas os velcros para melhor ajuste.

Imagens do Artigo: