

Finalidade:

Ortótese de imobilização e proteção da articulação do joelho. Indicado para Imobilização pré e pós-cirúrgica. Osteotomias correctivas. Tratamento conservador das fracturas da rótula. Entorses ligamentares e traumatismos.

Características:

Imobilizador com 3 painéis em material confortável e respirável. Os painéis podem ser adaptadas para obter o grau de flexão desejado. Adapta-se perfeitamente a todos os perímetros das pernas graças aos seus dois painéis laterais amovíveis. Sistema de fecho com velcro. Sem látex. Espaço aberto para a rótula.

Dimensões altura:

S: 42cm;

M: 46cm;

L: 59cm;

XL: 66cm

Cor: Preto e cinzento

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: RD400

Marca: Ortec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

A joelheira deve ser adaptada por ortoprotésicos qualificados ou um médico. A escolha certa de tamanho é essencial pra alcançar a máxima eficácia do tratamento e prolongar a vida útil do artigo.

Indicado para Imobilização pré e pós-cirúrgica. Osteotomias corretivas. Tratamento conservador de fraturas da rótula. Entorses ligamentares e traumatismos.

Imagens do Artigo: