



**TERMÓMETRO INFRAVERMELHO 2
EM 1 SEM CONTATO**

REF. 861207





IMPORTANTE

Leia este manual com atenção antes de utilizar este produto e guarde-o para futuras consultas.

Usuário: Caso não consiga ler ou compreender algum aviso, precaução ou instrução, entre em contacto com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto para evitar riscos e danos.

Consulte seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo. Ele ou ela irá orientar e informar sobre o uso mais adequado para o seu caso.

Distribuidor: este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Os termômetros sem contacto 2 em 1 são equipamentos médicos. Esses aparelhos oferecem uma medição precisa, segura e rápida da temperatura tanto no ouvido quanto na testa.

CONTEÚDO

N	Nome	Quantidade
1	termómetro sem contacto 2 em 1	1
2	Bolsa	1
3	Pilhas (AAA, opcional)	2
4	Manual de instruções	1

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode causar riscos de lesões graves.

1. Mantenha fora do alcance de crianças menores de 12 anos.
2. Nunca mergulhe o termómetro em água ou outros líquidos (não é à prova d'água). Para limpar e desinfetar, siga as orientações da seção "Cuidados e limpeza".
3. Nunca utilize o termómetro para fins diferentes daqueles para os quais foi criado. Siga sempre as orientações gerais de segurança para uso com crianças.
4. Guarde o termómetro longe da luz solar direta, em local seco, livre de poeira e bem ventilado, com temperatura entre 10°C (50°F) -40°C (104°F). Não utilize o termómetro em ambientes com alta humidade (>95% RH).
5. Não utilize o termómetro caso haja sinais de danos no sensor de medição ou no próprio aparelho. Se houver avarias, não tente reparar. Entre em contato com o distribuidor.
6. Este termómetro é composto por peças de alta precisão e qualidade. Não deixe o aparelho cair. Proteja-o contra impactos e batidas fortes. Não force o aparelho ou o sensor.
7. Consulte um médico caso apresente sintomas como irritabilidade sem motivo, vômitos, diarreia, desidratação, mudanças no apetite ou nas atividades, convulsões, dores musculares, calafrios, rigidez no pescoço, dor ao urinar, entre outros sintomas.
8. Mesmo sem febre, pessoas com temperatura corporal dentro do normal podem precisar de cuidados médicos. Aqueles que utilizam antibióticos, analgésicos ou antitérmicos não devem ser avaliados apenas pela temperatura ao determinar a gravidade da doença.
9. O aumento da temperatura pode indicar um problema de saúde sério, especialmente em idosos frágeis ou adultos com sistema imunológico enfraquecido, assim como em recém-nascidos e bebês. Procure orientação profissional imediatamente se a temperatura subir e se estiver medindo a temperatura de alguém:
 - Acima de 60 anos (a febre pode surgir de repente ou até não aparecer em pacientes idosos)
 - Pessoas com diabetes mellitus ou imunidade comprometida (como HIV positivo, câncer, quimioterapia, tratamento prolongado com corticoides, esplenectomia), pacientes acamados (por exemplo, moradores de asilo, vítimas de AVC ou doenças crônicas). Pacientes transplantados (como de fígado, coração, pulmão ou rim).
10. Este termómetro não é indicado para uso em bebês prematuros. Também não é recomendado para leitura de temperaturas hipotérmicas. Crianças não devem usar o termómetro sem supervisão.
11. O uso deste termómetro não substitui a consulta com seu médico ou pediatra. Destina-se apenas ao uso doméstico.

12. Limpe a ponta do termómetro após cada uso.
13. Não utilize o termómetro em recém-nascidos ou para monitoramento contínuo da temperatura.
14. Evite realizar medições durante ou logo após amamentar o bebé.
15. Os pacientes não devem beber, comer ou praticar atividades físicas antes ou durante a medição.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Visão geral

O termómetro infravermelho mede a temperatura corporal com base na energia infravermelha emitida pelo tímpano ou pela testa. Os usuários podem obter resultados rápidos ao posicionar corretamente o sensor de temperatura no canal auditivo ou na testa.

A temperatura corporal normal varia dentro de um intervalo. As tabelas a seguir mostram que esse intervalo também depende da localização. Por isso, as medições feitas em locais diferentes não devem ser comparadas diretamente. Informe ao seu médico qual tipo de termómetro foi utilizado e em qual parte do corpo a temperatura foi medida. Considere isso também ao fazer seu próprio diagnóstico.


	Medições
Temperatura da testa	36,1°C a 37,5°C (97°F a 99,5°F)
Temperatura do ouvido	35,8°C a 38°C (96,4°F a 100,4°F)
Temperatura oral	35,5°C a 37,5°C (95,9°F a 99,5°F)
Temperatura retal	36,6°C a 38°C (97,9°F a 100,4°F)
Temperatura axilar	34,7°C-37,3°C (94,5°F-99,1°F)

2. Estrutura

O termómetro é composto por um corpo, uma tela LCD, um botão para medições, um indicador sonoro, um sensor de temperatura infravermelho e um microprocessador.

3. Princípio de funcionamento

O sensor infravermelho de temperatura capta a energia emitida pelo tímpano ou pela superfície da pele. Após ser focalizada por uma lente, essa energia é convertida em uma leitura de temperatura pelas termopilhas e pelos circuitos de medição.

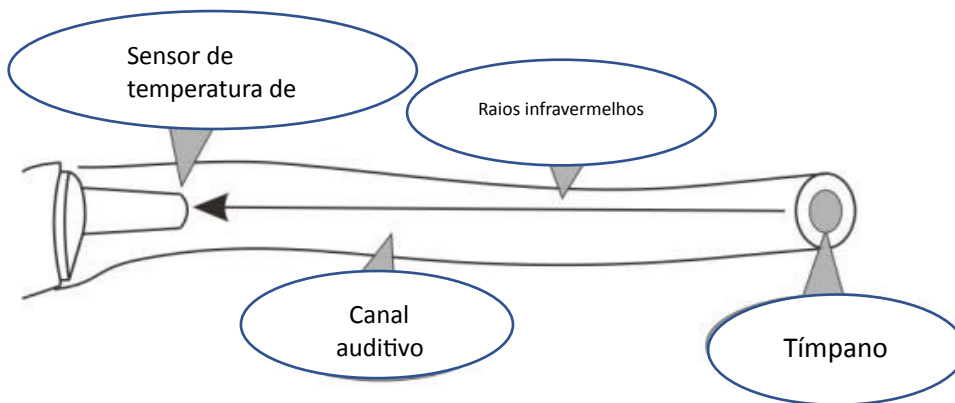

4. Indicações de uso

O termómetro infravermelho com modo duplo foi desenvolvido para medir a temperatura corporal. O modo de medição pela testa é indicado para pessoas de todas as idades, enquanto o modo pelo tímpano é recomendado para maiores de três meses.

5. Contraindicações

Não utilize o termómetro caso o ouvido esteja com infecção ou secreção.

FUNCIONALIDADES


- Medição rápida, em menos de um segundo
- Alta precisão e confiança
- Operação simples, com apenas um botão, para medir tanto no ouvido quanto na testa

NOT-AD - 62 de novembro de 2020 (Versão 1.


0) 3

- Multifuncional: mede a temperatura dos ouvidos, da testa, do ambiente, do leite, da água e de objetos.
- Memória: 35 medições, fácil de consultar
- Alterna entre modo silencioso e modo normal
- Alarme para febre, com indicação em laranja e vermelho.
- Alterna entre °C e °F
- Desligamento automático e economia de energia

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

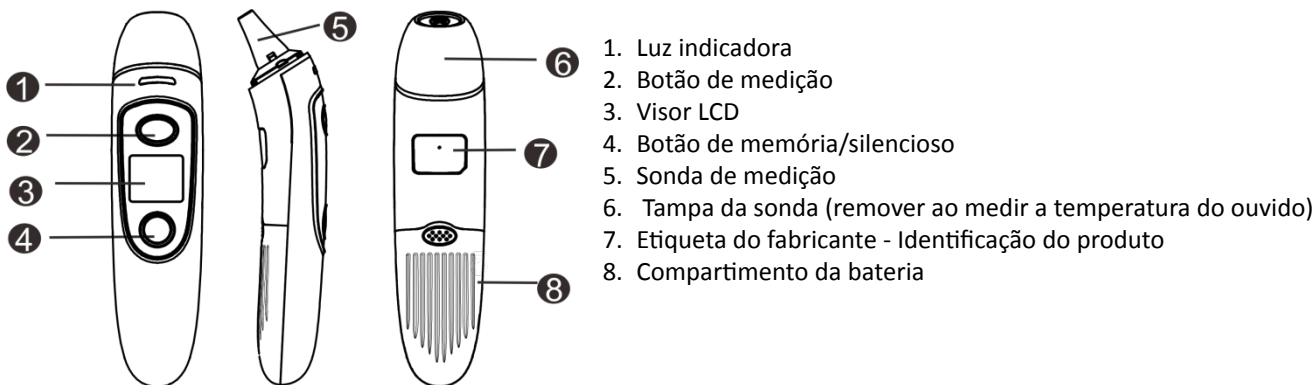


TELA DE DESCRIÇÃO

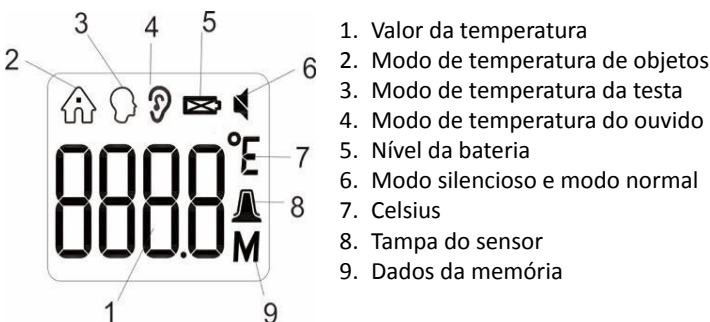

UTILIZAÇÃO DO TERMÓMETRO

Ao usar o termômetro pela primeira vez, lembre-se de carregar as

baterias. 1. Medindo a temperatura na testa

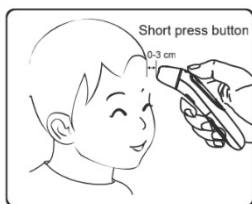

Segure o termômetro a uma distância de 0 a 3 cm da testa, apontando para o centro. Inicie a medição com um breve toque em " " \cup , depois é só conferir o resultado.

OBSERVAÇÃO: A medição na testa é apenas uma indicação. A temperatura obtida pode variar até 1°F/0,5°C em relação à temperatura corporal real. Considere os fatores que influenciam a precisão, conforme explicado nas seções "Dicas para medir a temperatura" e "Precauções".



Se a área das sobrancelhas estiver coberta por cabelo, suor ou sujeira, limpe-a antes para garantir uma leitura mais precisa.

Sempre verifique se a lente está limpa.



Certifique-se de que o usuário e o termômetro estejam na mesma sala por pelo menos 30 minutos antes de realizar a medição.

2. Meça a temperatura no ouvido.

Retire o protetor da sonda, insira-a cuidadosamente no canal auditivo. Aperte e solte o botão de medição em até 1 segundo, quando ouvir o bip, já pode conferir o resultado.


Garanta que o ouvido esteja limpo, sem cera ou qualquer obstrução.

NOT-AD - 62 de novembro de 2020 (Versão 1.

0) 4

A leitura do ouvido direito pode ser diferente da leitura do ouvido esquerdo.

Por isso, sempre meça a temperatura no mesmo ouvido.

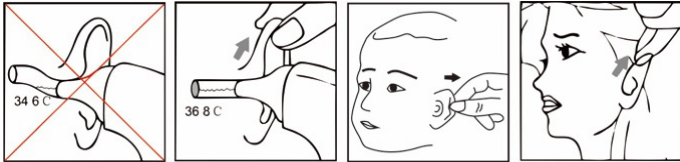


Crianças a partir de 1 ano até adultos: Puxe a orelha para cima e para trás.

Não force o termómetro no canal auditivo. Caso contrário, o canal pode ser danificado. Ao medir a temperatura em adultos, puxe suavemente a orelha para cima e para trás para deixar o canal auditivo reto, permitindo que o sensor capte o raio infravermelho do tímpano. Tenha atenção ao medir a temperatura de crianças com canal auditivo estreito.



3. 3. Meça a temperatura do ambiente/objeto. Quando

o termómetro estiver desligado, prima o botão  durante 3 segundos até que o visor se acenda. Em seguida, prima o botão de medição para efetuar a medição. Segure o termómetro a cerca de 1-5 cm do objeto. Prima e solte o botão de medição no espaço de 1 segundo; ouvirá um sinal sonoro e poderá então ler o valor



4. Após a medição

Assim que a leitura for concluída, retire o termómetro da testa ou do ouvido e confira a temperatura. Após cada uso, é possível acessar o modo de recuperação para visualizar as medições anteriores.



Não deixe o termómetro exposto por muito tempo, pois ele é sensível à temperatura do ambiente.

Após cada uso, limpe o sensor de temperatura com um pano macio e guarde o termómetro em um local seco e arejado.



Espere pelo menos 10 segundos entre uma medição e outra.

Não é seguro fazer autodiagnóstico ou se automedicar com base nos resultados das medições. Em caso de dúvida, consulte um profissional de saúde.

5. Confira sua temperatura...

A letra T indica uma medição de temperatura. Funciona tanto no modo testa quanto no modo ouvido.

1. Se a temperatura for $32\text{ °C} \leq T \leq 37,3\text{ °C}$ ($89,6\text{ °F} \leq T \leq 99,2\text{ °F}$), a luz verde permanece acesa durante 3 segundos, acompanhada de um sinal sonoro prolongado.
2. Se a temperatura for $37,4\text{ °C} \leq T \leq 37,9\text{ °C}$ ($99,3\text{ °F} \leq T \leq 100,3\text{ °F}$), a luz laranja permanecerá acesa durante 3 segundos, acompanhada de 3 bipes curtos, e o valor no LCD piscará, indicando que pode ter uma ligeira febre.
3. Se a temperatura for $38\text{ °C} \leq T \leq 42,9\text{ °C}$ ($100,4\text{ °F} \leq T \leq 109,2\text{ °F}$), a luz vermelha permanecerá acesa durante 3 segundos com 5 bipes curtos e o valor no LCD piscará, indicando que pode ter febre alta.

6. Alternando entre modo silencioso e modo com som

Ao ligar o termómetro, mantenha pressionado o botão "Memory/Mute-unmute" por 2 ou 3 segundos para alternar entre as funções "un-mute" e "mute".



7. Verificação dos 35 registos de memória

Quando o termómetro estiver ligado ou desligado, pressione o botão "Memory/Mute-unmute" para acessar o modo de memória, pressione novamente para verificar os 35 registos um a um. Se não houver valores, será exibido "---M".


8. Conversão entre °C/°F

Abra o compartimento da bateria e use o interruptor para alternar entre °C/°F.

9. Ajuste de compensação de temperatura

Ao ligar o termômetro, pressione os dois botões Memória/Silêncio/Não Silêncio por 2 a 3 segundos para acessar o modo de ajuste de temperatura. Pressione o botão Memória/Silêncio/Não Silêncio para ajustar a temperatura de $\pm 0,0$ até $\pm 2,0$.

Nota: Qualquer temperatura medida futuramente será automaticamente somada ao valor ajustado.

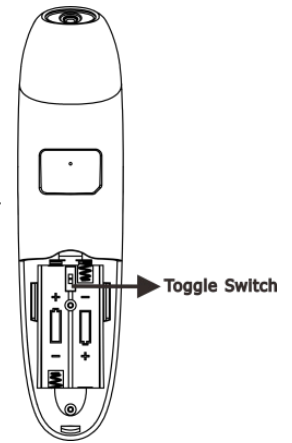

10. Como desligar

O aparelho desliga automaticamente após 10 segundos sem uso. Também é possível manter o botão "Medir" pressionado por 5 a 7 segundos.



Todos os registros da memória serão apagados ao remover ou reinstalar a bateria.

Todos os ajustes serão restaurados para os valores padrão ao remover a bateria. Caso precise alterar as configurações, ligue o aparelho e faça os novos ajustes.

11. Trocar a bateria

Deslize a tampa da bateria até a posição correta. Coloque duas pilhas AAA no compartimento de forma adequada. Retire as pilhas se o termômetro ficar sem uso por mais de dois meses.

DICAS PARA MEDIR A TEMPERATURA

1. É fundamental conhecer a temperatura normal de cada pessoa quando está saudável. Só assim é possível identificar uma febre com precisão. Registre as medições duas vezes ao dia (logo ao acordar e à tarde). Faça a média das duas temperaturas para calcular o valor equivalente da temperatura oral normal. Sempre meça no mesmo local, pois as leituras podem variar de uma parte da testa para outra.
2. A temperatura normal de uma criança pode ser 37,7°C ou 36,11°C. Lembre-se que este aparelho mostra 0,5°C (0,9°F) a menos que um termômetro digital retal.
3. Fatores externos podem alterar a temperatura do ouvido, como quando a pessoa:
 - ficou deitada sobre uma das orelhas
 - estava com os ouvidos obstruídos
 - foi exposta a temperaturas muito quentes ou muito frias, ou
 - recentemente nadou ou tomou banho

Nesse caso, retire a pessoa da situação e aguarde 20 minutos antes de medir a temperatura.

Meça a temperatura pelo ouvido apenas se não foram aplicadas gotas ou outros medicamentos no canal auditivo.

4. Segurar o termômetro por muito tempo na mão antes de medir pode aquecer o aparelho, prejudicando o resultado.

5. Os pacientes e o termômetro devem permanecer em repouso no ambiente por pelo menos 30 minutos antes da medição.

6. Antes de posicionar o sensor do termômetro na testa, remova qualquer sujeira, cabelo ou suor da região. Aguarde 10 minutos após a limpeza para realizar a medição.

7. Limpe bem o sensor com um cotonete embebido em álcool e espere 5 minutos antes de medir outro paciente. Limpar a testa com pano quente ou frio pode alterar o resultado. Espere 10 minutos para fazer a medição.


8. Nas situações a seguir, recomenda-se medir de 3 a 5 vezes no mesmo local e considerar a temperatura mais alta registrada:

- Recém-nascidos nos primeiros 100 dias de vida.
- Crianças menores de três anos com sistema imunológico enfraquecido, onde a presença ou ausência de febre é fundamental.
- Quando o usuário está aprendendo a utilizar o termômetro até se habituar ao aparelho e obter resultados consistentes.







CUIDADOS E LIMPEZA

Utilize um cotonete ou algodão embebido em álcool 70% para limpar a superfície do termômetro e da sonda. Espere o álcool evaporar completamente antes de realizar uma nova medição.

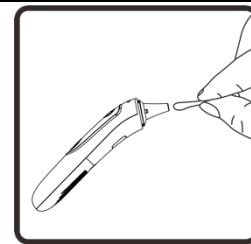Evite que líquidos entrem no termômetro. Jamais utilize produtos abrasivos, solventes ou benzeno para limpar e nunca mergulhe o instrumento em água ou outros líquidos de limpeza. Tome cuidado para não arranhar a tela LCD.

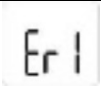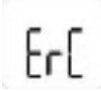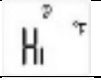

ERROS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Possíveis causas...	Descrição e solução
Falha ao ligar	Nível da bateria muito baixo	Troque por uma bateria nova
	As polaridades da bateria estão invertidas	Confira se as baterias estão posicionadas corretamente
	O termômetro apresenta defeito	Entre em contacto com o distribuidor
A medição está muito baixa	A lente da sonda está suja	Limpe a lente com um cotonete
	A distância entre o objeto e o alvo está muito grande.	Mantenha o termômetro encostado na testa ou coloque a sonda no canal auditivo.
	Você acabou de sair de um ambiente frio	Fique em um local mais quente por pelo menos 30 minutos antes de medir a temperatura.
A medição está muito alta	Você acabou de sair de um ambiente quente	Fique em um ambiente fresco por pelo menos 30 minutos antes de fazer a medição
	A temperatura do ambiente está fora do intervalo permitido.	Três bipes curtos e luz de fundo vermelha por 3 segundos. Realize a medição em um ambiente com temperatura entre 10°C e 40°C.
	Erro de memória	Três bipes curtos e luz de fundo vermelha por 3 segundos. Entre em contacto com seu distribuidor.
	No modo ouvido ou testa, $T > 42,9^{\circ}\text{C}$ (109,2°F)	Três bipes curtos e luz de fundo vermelha por 3 segundos.
	No modo ouvido ou testa, $T < 32^{\circ}\text{C}$ (89,6°F)	Três bipes curtos e luz de fundo vermelha por 3 segundos.
	$2,5\text{ V} \pm 3\% \leq \text{tensão} \leq 2,6\text{ V} \pm 3\%$	O nível da bateria está baixo, recomenda-se trocar, mas ainda é possível utilizá-la.
	A tensão de alimentação está abaixo de $2,5\text{V} \pm 3\%$.	Desliga automaticamente após 30 segundos. Por favor, troque a bateria por uma nova.

CARACTERÍSTICAS

Nome do produto	termómetro sem contacto 2 em 1	
Fonte de energia	DC1.5V×2	
Faixa de medição	Ouvido e testa: 32,0°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)	
	Objeto: 0°C-100°C (32°F-212°F)	
Precisão (Laboratório)	Ouvido e testa	±0,2 °C / ±0,4 °F
	Modo objeto	±1,0°C/1,8°F
Resolução da tela	0,1 °C/°F	
Desligamento automático	10s±1s	
Memória	35 registos de temperatura	
Condições de operação	Temperatura: 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F) / Humidade: 15-95 % HR, sem condensação Pressão atmosférica: 86-106 kPa	
Pilhas	2*AAAA, pode ser utilizado mais de 3000 vezes	
Peso e dimensões	66g (sem pilhas), 163,3×39,2×38,9mm	

SÍMBOLOS

Símbolos	Descrição
	Tipo BF. Partes aplicadas
	Informações do fabricante
	Leia atentamente as instruções.
	Resíduos eletrônicos devem ser destinados a um ponto de coleta específico para reciclagem.
SN	Número de série
LOTE	Número do lote
	IMPORTANTE O uso incorreto do termómetro pode resultar em leituras imprecisas ou danificar o
IP22	aparelho. 2 Proteção contra objetos estranhos com 12,5 mm ou mais 2 Resistência à entrada de gotas de água que caem verticalmente quando o aparelho está inclinado a 15°.

INFORMAÇÕES SOBRE EMC

Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas		
O termómetro infravermelho foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do termómetro infravermelho deve garantir que ele seja utilizado nesse ambiente.		
Teste de emissão	Conformidade	Orientação sobre o Ambiente Eletromagnético
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O termómetro infravermelho utiliza energia de RF apenas para sua operação interna. Por isso, as suas emissões de radiofrequência são mínimas e não devem causar interferências em aparelhos eletrônicos próximos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	O termómetro infravermelho pode ser utilizado em todos os locais, exceto residências, e também nos que estão conectados diretamente à rede pública de energia de baixa tensão.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	NÃO.	
Flutuações de tensão /emissões de cintilação IEC 61000-3-3	NÃO.	Uma rede que atende edifícios destinados a uso residencial.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O termómetro infravermelho foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do termómetro infravermelho deve garantir que ele seja utilizado nesse ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC60601	Nível de conformidade	Guia sobre o ambiente eletromagnético
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±2, ±4, ±6 kV para o contacto de descarga ±2, ±4, ±8 kV, ±15 kV Descarga atmosférica	±2, ±4, ±6 kV para o contacto de descarga ±2, ±4, ±8 kV, ±15 kV Descarga atmosférica	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou revestidos com cerâmica. Se houver cobertura sintética, a humidade relativa precisa ser de pelo menos 30%.
Impulso eléctrico rápido / transiente de explosão IEC 61000-4-4	±2 kV para as linhas de energia CA ±1 kV para as linhas de energia CC	NÃO.	A qualidade da rede eléctrica deve ser equivalente à de um ambiente comercial ou hospitalar padrão.
Alterar IEC 61000-4-5	Linha(s) de ±1 kV para linha(s) Linha(s) de ±2 kV para o terra	NÃO.	A qualidade da rede eléctrica deve ser equivalente à de um ambiente comercial ou hospitalar padrão.
Quedas de tensão, interrupções breves e variações de tensão nas linhas de entrada da fonte de alimentação IEC 61000-4-11	<5% UT (>95 queda em UT) por um ciclo de 0,5 40% UT (60% de queda em UTN) por 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) por 25 ciclos <5%UT (>95%) queda em UT por 5 s	NÃO.	A qualidade do fornecimento de energia deve ser equivalente a um ambiente comercial ou hospitalar padrão. Caso o usuário do termómetro infravermelho precise de operação ininterrupta durante cortes de energia, recomenda-se que o aparelho seja alimentado por uma fonte de energia ininterrupta (UPS) ou por bateria.
Campo magnético de frequência de energia (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos de frequência de energia devem manter os níveis típicos de um local padrão em um ambiente comercial ou hospitalar padrão.
NOTAUT corresponde à tensão da rede eléctrica antes da aplicação do nível de teste.			

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O termómetro infravermelho foi desenvolvido para uso em ambientes eletromagnéticos conforme especificado abaixo. É responsabilidade do cliente ou usuário garantir que o termómetro seja utilizado nesse ambiente.			
Teste de imunidade	IEC 60601 Nível de teste	Nível de conformidade	Ambiente orientação eletromagnético
Condução de RF IEC 61000-4-6	3Vrms 150kHz a 80MHz	NÃO.	Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do termómetro infravermelho, incluindo os cabos, a menos que respeitem a distância de separação recomendada, calculada de acordo com a equação referente à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada
Alcance IEC 61000-4-3	3V/m 80kHz a 2.5GHz	3V/m	d=1,2 P d=1.2 P 80MHz a 800MHz d=2.3 P 800MHz a 2.5MHz Aqui, P representa a potência máxima de saída do transmissor em watts (W)

de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m). As intensidades de campo dos transmissores de radiofrequência fixos, determinadas por um estudo eletromagnético do local, devem estar abaixo do nível de conformidade b em cada gama de frequências. Podem ocorrer interferências nas proximidades do equipamento marcado com o seguinte símbolo:



NOTA 1 Para 90MHz e 800MHz, considera-se a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2 Estas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética pode ser afetada pela absorção e pelo reflexo de estruturas, objetos e pessoas.

a As intensidades de campo dos transmissores fixos, como estações base para telefones (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amadora, radiodifusão AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores fixos de radiofrequência, recomenda-se um estudo do local eletromagnético. Se a intensidade de campo medida onde o termómetro for utilizado exceder o nível de conformidade de RF mencionado acima, o termómetro deve ser monitorado para garantir seu funcionamento normal. Se for observado funcionamento anormal, podem ser necessários ajustes adicionais, como mudar a orientação ou realocar o termómetro.

b Na faixa de frequências de 150kHz a 80MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis ou móveis e o termómetro infravermelho

O termómetro infravermelho foi desenvolvido para ser usado em ambientes eletromagnéticos onde as perturbações de radiofrequência irradiada são controladas. O cliente ou usuário do termómetro infravermelho pode contribuir para evitar interferências eletromagnéticas mantendo a distância entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o termómetro infravermelho no mínimo recomendado abaixo, considerando a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência máxima de saída do W	Distância de separação conforme a frequência de transmissão m		
Potência máxima de saída nominal do transmissor W	150kHz a 80MHz $d = 1,2 P$	80MHz a 800MHz $d = 1,2 P$	800MHz a 2,5GHz $d = 2,3 P$
0,01	0,01	0,12	0,23
0,1	0,1	0,38	0,73
1	1	1,2	2,3
10	10	3,8	7,3
100	100	12	23

No caso de transmissores cuja potência máxima de saída não esteja indicada acima, a distância de separação recomendada d , em metros (m), pode ser calculada utilizando a equação correspondente à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W), conforme especificado pelo fabricante.

NOTA 1: Para 80MHz e 800MHz, aplica-se a distância de separação indicada para a faixa de frequência mais alta. NOTA 2: Essas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética pode ser influenciada pela absorção e pelo reflexo de estruturas, objetos e pessoas.

GARANTIA

Este produto possui garantia de dois anos a partir da data de compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente que apresente defeito de fabricação, projeto ou material. Em caso de necessidade de acionamento da garantia, entre em contacto com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Falhas resultantes de danos acidentais, uso inadequado, alterações ou desgaste natural não são cobertas por esta garantia. Para solicitar o atendimento da garantia, procure o distribuidor onde realizou a compra.



Shenzhen Finicare Co, Ltd
201, Edifício Dehe, Nº 81, Haoyong, No.
Parque Industrial 2, Comunidade Hongxing
Rua Songgang, Distrito de Bao'an
Shenzhen, Guangdong
518103 CHINA

Distribuído por

Identités – ZA Polo 49
Av. da Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

