

Finalidade:

Termómetro 2 em 1, sem contacto, pode ser utilizado como termómetro intra-auricular. Medição instantânea de temperatura. Capacidade para 35 memórias.

Termómetro ergonómico.

Características:

Termómetro auricular ou infravermelho.

Capacidade para 35 memórias

Vem com uma bolsa de armazenamento.

Funciona com 2 pilhas AA fornecidas.

Cor: Azul

Modelo:

861207

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357

RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar a sonda do termómetro após cada utilização.

Não utilizar o termómetro em recém-nascidos ou para fins de monitorização contínua.

Não beber, comer ou estar fisicamente ativo antes ou durante a medição.

Não mergulhe o termómetro em água ou outros líquidos. Para limpar e desinfetar, siga as instruções da secção "Cuidados e limpeza".

Utilize uma compressa com álcool a 95% para limpar o termómetro e a sonda de medição. Só deve efetuar nova medição após estar completamente seco.

Instruções de utilização:

O termómetro pode ser utilizado para medir a temperatura na testa para todas as idades e no modo tímpano é indicado para pessoas com mais de três meses de idade. Não utilizar o modo tímpano se o ouvido estiver infetado com supuração de otite.

Efetuar a medição a uma distância de 3 cm da testa.

Seguir as instruções do manual de instruções.

Imagens do Artigo: