




APOIO / PEGA DE ACESSO A BANHEIRA

812093

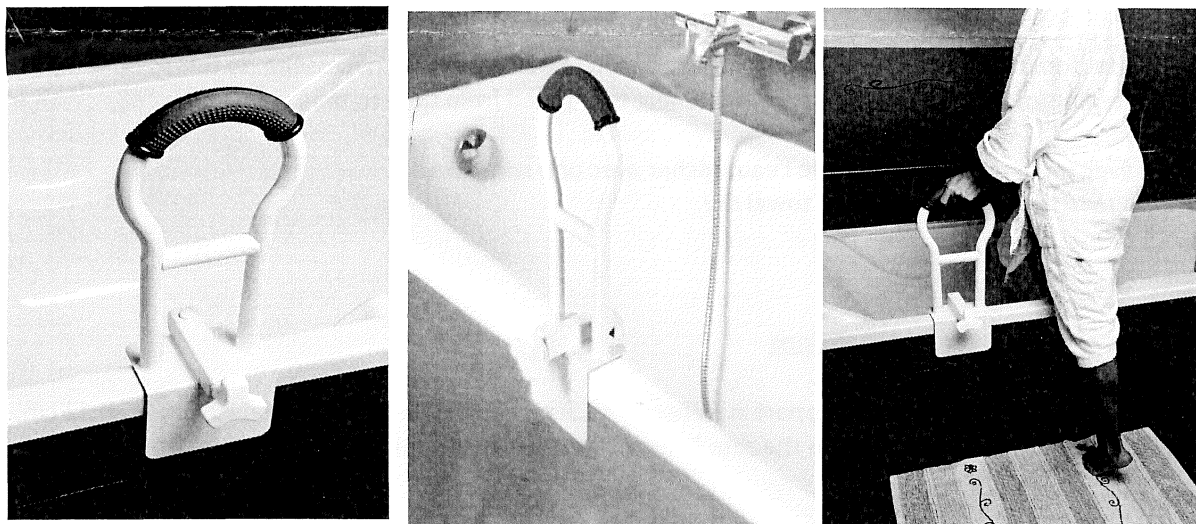

Inspecionar cuidadosamente todas as peças para detetar fissuras/quebras antes de as utilizar.

Instruções de montagem

1. **Limpe bem a banheira e seque-a antes de aplicar a calha. As superfícies de contacto devem estar secas e sem resíduos de sabão para garantir uma instalação segura.**
2. **Desaperte a porca de aperto até a calha ficar suficientemente larga para deslizar para o lado da banheira.**
3. **Coloque a calha de segurança na banheira com a porca virada para o exterior da banheira e aperte-a até a calha ficar firme e segura.**
4. **Para testar a instalação da calha, puxe-a para a frente, para trás e de um lado para o outro. Se a calha escorregar ou se deslocar, certifique-se de que a superfície não tem película de sabão e está seca e, em seguida, volte a colocá-la no local previsto.**

Instruções de utilização

Agarre firmemente a pega do corrimão quando entrar e sair da banheira. Faça movimentos lentos para evitar escorregar.

Cuidados e manutenção

Verificar o dispositivo de aperto antes de cada utilização; é necessário voltar a apertar de vez em quando. Limpar com detergente suave e água, secar com uma toalha.

Dimensões gerais

Altura.31 x Largura.20 cm. Altura a partir do bordo: 37,5 cm. Borda da banheira mini 7 cm, maxi 12 cm.



Tenha muito cuidado ao instalar em banheiras feitas de fibra de vidro, pois o aperto excessivo da braçadeira pode rachar a banheira.



As pessoas com deficiências graves ou pessoas que não consigam andar sem ajuda não devem tentar utilizar este produto sem assistência.



Peso máximo suportado 114 kg



Identites – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

