

Finalidade:

Barra de acesso à banheira, prende na borda da banheira e ajuda a passar por cima da borda da banheira com mais segurança. Ideal para pessoas com dificuldades em equilíbrio.

Fácil de instalar, não necessita de ferramentas de instalação.

Características:

Aro da banheira mínimo 8cm, max.12cm. Altura da banheira: 37,5cm.

Parte superior da barra de apoio antiderrapante.

Peso máximo suportado: 100kg

Dimensões:

Altura: 31cm;

Largura: 20cm

Altura a partir da borda: 37,5cm

Cor: Branco

Modelo: 812093

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpe bem a banheira e seque-a antes de aplicar a calha. A superfície de contacto deve estar seca e sem resíduos de sabão para garantir uma instalação segura.

Desaperte a porca, encaixe na banheira e aperte a porca. Teste, abanando de um lado para o outro para garantir que está bem montada. Se abanar ou deslizar terá que repetir o processo.

Nota: A instalação da pega em banheiras de fibra de vidro, em caso de aperto excessivo, a banheira pode rachar.

Instruções de utilização:

Verifique que a pega está bem apertada antes de utilizar.

Agarre-se firmemente à pega quando entrar e/ou sair da banheira. Faça movimentos lentos para evitar escorregar.

Imagens do Artigo: