

Finalidade: Almofada com formato semicircular, facilita as manobras de rotação do paciente, utilizando ambas as alças laterais, e alivia a tensão nas costas do operador. É macio e confortável.

A almofada de reposicionamento é indicada para utilização em: pessoas com mobilidade reduzida, idosos, pessoas após lesões e cirurgias. Trata-se de uma ajuda muito útil que melhora a qualidade de vida do doente e facilita a vida do prestador de cuidados.

Características:

Bomba de inflação. Bolsa interna em PVC médico, forro amovível 100% poliéster.

Dimensões: 49 x 40 x 15cm (varia conforme a pressão exercida)

Cor: Azul

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: ST390

Marca: Opera

Declaração de Conformidade: Diretiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Mantenha a almofada longe de fontes de calor. Limpeza da capa: Não branquear. Lavar à mão, temperatura máxima de 30°C. Não limpe a seco, não utilize removedores de manchas com solventes. Não passar a ferro.

Instruções de Utilização:

Não use sem a capa. Não utilize a almofada em contacto direto com a pele.

Não vire o paciente sobre superfícies estreitas ou na beira da cama.

A utilização da almofada não proporciona um posicionamento estático estável, recomenda-se a utilização de outros suportes para apoiar o paciente em decúbito lateral.

Coloque a almofada sob as pernas do doente. Levante a almofada para que as pernas se encaixem nas ranhuras. Use as duas mãos para girar suavemente o paciente para o lado (uma nas costas e outra na almofada).

Imagens do Artigo:

