

Finalidade: Pé Equino (torto) em paralisia flácida com e sem desvio em varo. Hemiplegia devido a acidentes vasculares cerebrais, AVC. Retração do tendão de Aquiles na paralisia cerebral infantil. Lesões do nervo ciático poplíteo externo. Efeitos: Auxilia a dorsiflexão e evita o equinos, controla o desvio do varus, facilita a marcha e a reabilitação funcional.

Características: Feito de propileno moldado. Incorpora as características de reforço necessárias, proporcionando ao mesmo tempo leveza, na área plantar. Correia de ajuste amovível na zona tibial. Acolchoamento na zona do gêmeo. Possibilidade de fita removível na zona do calcanhar-pé. Haste anti-varus de tensão ajustável.

Dimensões: S , M , L

Altura em Cm:

S – 28cm, Esquerdo e Direito

M - 34cm, Esquerdo e Direito

L - 39cm, Esquerdo e Direito

Tamanho do Calçado:

S (31-35), Esquerdo e Direito

M (36-40), Esquerdo e Direito

L (41-45), Esquerdo e Direito

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: AFO210

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,

Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -

qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Para as almofadas e tiras de ajuste: lavagem com água morna (máx.30º) e sabão neutro. Durante a lavagem os velcros devem ser colados e mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem deteriorar o artigo. Não usar lixívia nem produtos corrosivos.

Instruções de utilização: O produto deve ser adaptado pelo protesista ou pelo médico de forma individual para cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil do artigo. Para a colocação das órteses plantares para entrar em calçado, recomendamos o uso de um calçado largo e laço, que é colocado na parte traseira. Basta ajustar a área do gêmeo, colocando a fita o mais confortável para o paciente na área da tibia. O corte superior deve ser sempre abaixo da cabeça da fíbula para evitar desconforto durante a caminhada. A ortose pode ser colocada diretamente sobre a pele, mas por conveniência, é aconselhável o uso de uma meia alta.

Auxilia na dorsiflexão e previne o equinismo. Controla o desvio do varo. Facilita a caminhada e a reabilitação funcional.

Imagens do Artigo:

