

Finalidade:

A canadiana combina conforto e inovação que permite a máxima segurança e independência ao utilizador.

O seu formato permite apoiar e/ou pendurar a Canadiana na extremidade de um móvel sem que caia. Contém também um pequeno suporte lateral na própria canadiana que permite encaixar as duas canadianas para permitir a deslocação do utilizador com uma só mão mas ficando com as duas canadianas em sua posse.

Características:

Tubo de alumínio de alta qualidade.

Ponteira antiderrapante substituível, com design flexível para máximo contacto e aderência com o chão, mesmo em planos inclinados.

Altura ajustável: entre 620 até 982mm;

14 ajustes com 25mm de espaçamento;

Peso: 460g;

Peso máximo do utilizador: 130kg;

Cor: Azul, Violeta e Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo:

816046.BLEU – Azul

816046.NOIR – Preto

816046.VIOLET – Violeta

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Distribuidor Europeu: Identités

Morada do distribuidor Europeu: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Fabricante: FDI France Medical Sarl

Morada do fabricante: 77 Route de Bauatière – Fitolieu. 38490 Les Abrets en Dauphiné - France

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A duração de vida das suas canadiana é influenciada pelas condições de utilização e de armazenamento, bem como pela regularidade dos cuidados e da manutenção.

Recomenda-se a limpeza regular. Prestar especial atenção ao cabo e à ponta, que devem ser limpos apenas com água. Limpar todas as superfícies com um pano macio e húmido e secar antes de utilizar. Nunca utilizar produtos abrasivos, lixívia, detergentes, produtos químicos ou gordurosos que possam danificar os materiais ou tornar as canadianas escorregadias.

Instruções de utilização:

Ajustar a Canadiana à altura adequado para o utilizador. Agarrar o punho da canadiana e apoiar o braço totalmente no encosto da Canadiana para maior conforto e segurança.

Imagens do Artigo: