

**Finalidade:**

Ortótese Cinta semirígida alta sacrolombar indicada para: Dores agudas e subagudas na zona lombar; Síndrome da faceta; protrusão do disco; hérnia de disco; espondilolistese – processos degenerativos; hipotonia muscular e reabilitação postural.

Efeitos: Suporte; estabilização; descarga lombar: controlo da mobilidade por flexão-Extensão

**Características:**

Ortótese Cinta semirígida Sacrolombar feita com tecido elástico e altamente respirável. Apoio e estabilização. Alívio Lombar. Controlo da mobilidade em flexão e extensão.

Peça sacrolombar que distribui a descarga e dá apoio à área. Incorpora quatro cintas de aço adaptáveis.

Fabricada sem costuras: evita sobrepressões e maximiza a leveza. Duas aberturas para uma fácil colocação. Almofada lombar incluída. Fixação por Micro-Velcro. Sem Latex : Hipoalergénico.

Altura dianteira: 19 cm . Altura traseira: 29cm.

**Dimensões (Circunferência do Tronco):** S , M , L , XL , 2XL , 3XL

S (79-85 cm),

M (85-91 cm),

L (91-99 cm),

XL (99-107 cm),

XXL (107-115 cm)

3XL (115-126 cm)

**Cor:** Cinza

**Modelo:** FJ204

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Marca:** Lumback (EMO)

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº

15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR

qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Colocar o cinto na área lombo-sacra na altura correta para uso. Ajuda de pinos para os dedos para apertar e ajustar a peça sobre o abdómen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

**Imagens do Artigo:**