

Finalidade: Bengala dobrável serve como auxiliar de marcha a pessoas com mobilidade reduzida.

Características: Dobrável em alumínio anodizado com pontas antideslizantes - ajustável em altura. Cabo em madeira. Peso máximo : 100kg

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP145NC

Marca: Mopedia

Dimensões: 77,5 a 88,5 Cm

Declaração de Conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Verifique o desgaste da ponta de borracha. Limpeza: Use apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover mais difícil terra. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca use jato Água ou vapor lavagem máquina.

Instruções de Utilização: Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas. Pressione o botão, deslize a bengala e leve-a a corresponder aos orifícios na altura exigida e à manobrabilidade do paciente. Coloque o pino no orifício para bloquear a bengala e certifique-se de que o botão está completamente no interior do orifício. Tenha muito cuidado em superfícies molhadas e escorregadias.

Imagens do Artigo:

