SOFÁ ORTOPÉDICO EV2001 INDICO G GeriMais

Finalidade:

É importante adaptar a casa quando se tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Estas pessoas têm frequentemente problemas de mobilidade e, por conseguinte, passam muito tempo sentadas. Para tornar a sua vida mais confortável, é muito importante ter um sofá/cadeira adaptado às suas necessidades, quer seja para relaxar ou descansar.

Características:

Motor único sem extensão de pé. Motor OKIN Refine.

Reclinação síncrona. 1 comando simples Peso máximo: Utilizadores até 145 kg.

Tela:

Hidrofóbica; Ignífuga; Respirável; Resistente à abrasão;

Lavável

Medidas:

Largura do assento : 50 cm; Profundidade do assento : 49cm;

Altura do assento : 49cm; Largura total: 75cm; Profundidade total : 85cm;

Altura do encosto: 70cm;

Altura do apoio de braços: 19cm; Altura da cadeira: 107cm;

Distancia mínima da parede: 70 cm Tamanho da embalagem: 83x76x65cm;

Lote: Ver embalagem

Cor: Camel

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV2001 Indico

Marca: EvoluXion

Mandatário: Evoluxion Health

Morada: Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

160-477 Lisboa, Portugal

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e conservação:

Não exceda o peso máximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presença de crianças ou animais de estimação.

Não permita que as crianças se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

Não mova a cadeira quando esta estiver numa posição deitada, quando a cadeira estiver ligada à fonte de alimentação e/ou em serviço. Certifique-se de que não existem cabos presos.

Instruções de utilização:

O sofá é entregue totalmente montado, com exceção do encosto, que é fácil de montar na cadeira.

Garantir que o sofá se encontra a uma distância mínima de 70cm da parede ou outro móvel nas costas do sofá.

Imagem do produto:



G GeriMais