

**Finalidade:**

Ortótise corretiva noturna para alinhar o desvio do joanete. Promove o alinhamento gradual do desvio dos dedos. Consegue uma correção ou desaceleração da evolução do desvio do primeiro dedo do pé e do metatarso.

Indicado para patologias Hallux Valgus, joanete.

**Características:**

Ortótise corretiva noturna para alinhar o desvio do joanete. Tala de alinhamento almofadada para o 1º dedo do pé com fecho de microvelcro macio.

**Dimensões:** S, L (esquerda) e  
S, L (direita)

**Cor:** Bege

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** VAL100

**Marca:** EMO

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia), Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO  
MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Abrir totalmente a ortótise e ajustar a cinta de velcro fechando com a pressão ideal.

**Imagens do Artigo:**