

Finalidade:

Esta tábua de banheira Java e Java Plus é ideal para poder tomar banho confortavelmente sentado. Destina-se a utilizadores que ainda possuem um bom controlo de tronco, mas sofrem de um ligeiro desequilíbrio e por isso procuram ganhar segurança e confiança na banheira. Benefícios: Transferência fácil e segura com a sua pega. Assento confortável, a base é antiderrapante e perfurada para facilitar a drenagem da água. Temos também o Disco giratório que é opcional e adaptável a ambas as tábuas, permite entrar e sair da banheira com mais facilidade.

Características:

Tábua de banheira em plástico termo moldado branco (PVC/Plástico Antiderrapante). Permite o ajuste a cada banheira. A base é antiderrapante e perfurada para facilitar a drenagem da água. Pega de apoio.

- Peso máximo suportado: 100 kg

Dimensões totais:

812176 – Java: Ajuste interno dos suportes: 40,5 a 65 cm, Comprimento 70cm x largura 26/30 cm

812274 – Java Plus: Ajuste interno dos suportes: 45,5 a 68 cm, Comprimento 75,5cm x largura 26,5/35 cm

812275 – Disco Giratório: 31,5cm de Diâmetro para aplicar na tábua Java ou Java Plus (excepto se adquiridas antes de 2024)

Cor:

Tabua: Branca

Disco Giratório: Azul

Lote e Data de produção : Ver embalagem

Modelo:

812176 – Tábua Banheira Java

812274 – Tábua Banheira Java Plus

812275 – Disco Giratório

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie.
49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,
Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

PVC/Plástico Antiderrapante, resistente fácil de limpar. A Tábua de banho tal como o disco giratório podem ser facilmente limpos com um detergente suave ou água morna com sabão. NÃO utilizar detergentes abrasivos ou esfregões.

Instruções de utilização:

Sem a ajuda de quaisquer ferramentas, o assento simplesmente pousa nas bordas da banheira e fixa-se com dois estabilizadores laterais antiderrapantes. O seu assento abrangente está equipado com furos que facilitam o fluxo de água. Nota: Siga as instruções descritas no manual que segue em anexo junto ao artigo.

Imagens do Artigo: