

Finalidade:

Cadeira de rodas para WC com rodas pequenas. É uma cadeira sanitária para idosos, pessoas com mobilidade reduzida que podem perder o equilíbrio com facilidade.

Características:

Com apoios de braços retráteis e apoios de pés duplos retráteis e removíveis, esta cadeira sanitária com rodízios em aço cromado está equipada com um encosto macio e fácil de remover para facilitar a limpeza. Assento duplo, um acolchoado.

Dimensões totais: largura. 54 x profundidade 93x de altura. 98 cm.

Dimensões do assento: largura. 44 x profundidade. 46x de altura. 50 cm.

Distância entre apoios de braços 43 cm.

Peso 14kg.

Peso máximo autorizado 165 kg.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE (UE) 2017/745

Modelo: 811065.N

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. É compatível com água quente ou fria. A fim de garantir uma utilização segura e um padrão adequado de higiene, o utilizador deve realizar estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes.

Manutenção e armazenamento:

Manter o artigo limpo e seco. Utilizar detergente não agressivo e utilizar um pano seco e macio para limpar no final da limpeza. Manter longe de fontes de calor direto. Proteja de poeiras ou corrosão (elementos abrasivos, areia, água salgada, ar salgado). Guardar sem pesos em cima e em piso direito.

Instruções de utilização:

Seguir as instruções de montagem. Antes de utilizar garanta que os travões estão acionados, para segurança de todos os intervenientes.

Imagens do Artigo:

