



# **CADEIRA DE RODAS COM RODAS PRETAS** *Manual de instruções*

REF.811065.N

(

# Símbolo que aparece no rótulo ou no manual de instruções

|     | Endereço do fabricante   | []i          | Convite à consulta do manual do utilizador |
|-----|--------------------------|--------------|--|
| ~J  | Data de produção         | $\triangle$  | Siga as instruções de segurança            |
| LOT | Número do lote           | CE           | Conformidade CE                            |
| REF | Referência do produto    | <del>*</del> | Não tolera humidade                        |
| kg  | Peso máximo do utilizado | r            |  |

# MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

### **IMPORTANTE**

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

### **PRODUTO DESTINO**

A cadeira de rodas WC com rodas cinzentas é um dispositivo médico. Trata-se de um sanitário técnico para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, feridos ou que podem facilmente perder o equilíbrio

# PRODUTO DESCRIÇÃO



- 1.Encosto
- 2. Apoio de braço
- 3.Roda de fixação
- 4.Assento
- 5.Penico com tampa
- 6.Roda de freio
- 7. Apoio para os pés

# **SEGURANÇA PRECAUÇÕES**



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- •Não exceda o peso máximo suportado de 165 kg.
- •Verifique se todos os componentes estão protegidos antes de usar.
- •Certifique-se de que o produto está em boas condições de funcionamento.
- •Verifique visualmente o produto.
- Antes de cada utilização do produto, os travões e os pneus devem ser verificados.
- •Verifique a estabilidade da cadeira antes de usar.
- •Use apenas em um terreno plano.
- •Quando estiver parado, aplique os travões nos rodízios.
- •Certifique-se de que os travões estão libertados antes de a cadeira ser movida novamente.
- •Certifique-se sempre de que o dispositivo está parado e travado aplicado durante a transferência de e para o dispositivo. Afaste os apoios de pernas antes de entrar ou sair do dispositivo. O utilizador deve sempre retirar os pés dos apoios das pernas antes de balançar os apoios das pernas.
- •Não se incline para fora do dispositivo.
- •Tenha cuidado com os pontos de beliscar quando subir ou baixar para estes, ou quando você está removendo o penico.
- •Certifique-se de que o penico repousa firmemente sobre os dois trilhos sob o assento.
- •Verifique, o desgaste dos rodízios, os rolamentos dos rodízios, os freios, o mecanismo de travamento do descanso das pernas, o assento e o encosto, as almofadas dos braços, o penico e a tampa.


# **MONTAGEM & USO**

### MONTAGEM DA ESTRUTURA DA CADEIRA

- •Solte os dois botões (1) de cada lado da cadeira do vaso sanitário enquanto os gira no sentido anti-horário.
- •Insira as secções do encosto (2) em ambos os recetores de quadros.
- •Fixe o encosto apertando os dois parafusos (1) rodando no sentido dos ponteiros do relógio.



### OPERAÇÃO DE APOIOS DE BRAÇOS

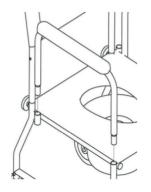


- •Os apoios de braços podem ser removidos para uma transferência lateral e substituídos, se necessário, pelo utilizador.
- •Para substituir os apoios de braços, coloque as duas extremidades do tubo do apoio de braço nos recetores localizados no quadro.
- •Para remover os apoios de braços, basta levantar os apoios de braços.

## INSTALAÇÃO DE APOIOS PARA OS PÉS

•Para colocar os apoios para os pés no lugar, insira os 2 orifícios tubulares nas asas quando o apoio para os pés estiver girado para fora. Em seguida, gire o apoio para os pés como mostrado no diagrama para bloqueá-lo na posição de uso na frente da cadeira.

 Para girar o apoio para os pés e retraí-lo, pressione a alavanca cromada enquanto empurra o apoio para as pernas. O apoio para as pernas pode então ser levantado para ser removido.

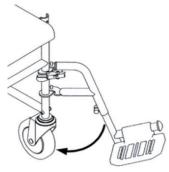

### UTILIZAÇÃO DE TRAVÕES SOBRE RODAS

Pressione a alavanca localizada acima da roda para aplicar o freio de estacionamento (conforme indicado no diagrama). Para soltar o bloqueio, pressione a aba saliente acima da roda.

### **USO DE PENICO E TAMPA**

- O bacio e a tampa estão alojados debaixo do assento de plástico.
  Para colocar o bacio, deslize-o por baixo do assento a partir da parte de trás da cómoda. Certifique-se de que o bacio está bem fixo nas duas calhas fixadas por baixo do assento.
- Para retirar o bacio, deslizar o bacio por baixo do assento. Colocar a tampa e transportar o bacio em segurança utilizando a pega cromada

# **CUIDADOS E MANUTENÇÃO**



A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

•Limpe regularmente à mão o produto (todos os rodízios, vedantes e fixações, panela e tampa) com um pano húmido e um detergente suave e desinfetante. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.

Seque com um pano macio limpo e seco.

- •As peças de poliuretano (PU) e plástico da cômoda podem ser limpas em uma máquina de descontaminante aquoso a 80°C. A limpeza da estrutura de alumínio desta forma não é recomendada, uma vez que pode causar danos na pintura.
- •A cadeira deve ser completamente revista todos os anos, com lubrificação obrigatória.
- •Recomenda-se que o dispositivo seja reparado pelo menos anualmente.
- Se o dispositivo estiver sujeito a uso intenso e/ou uso em um ambiente multiusuário, recomendamos que o dispositivo seja reparado com mais frequência.
- •Os pneus gastos, rolamentos das rodas, rodízios, travões, mecanismo de bloqueio do descanso das pernas, almofadas do banco e das costas, almofadas dos apoios de braços, pino de libertação rápida, panela e tampa, clipes «E», devem ser reparados, substituídos, ajustados e/ ou lubrificados, se necessário. •Em caso de avaria, não repare o produto sozinho. Consulte um

revendedor autorizado.

# **MUDANÇA DE PROPRIEDADE**

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

### RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

### **ARMAZENAGEM**



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
- - Ém lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto embalando contra poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os componentes do produto, não emperre nada...).

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Dimensões globais        | largura 54 cm x profundidade 93 cm x altura 98 cm |  |
|--------------------------|---|--|
| Dimensões do assento     | largura 44 cm x profundidade 46 cm x altura 50 cm |  |
| Altura do encosto        | 42 cm   |  |
| Altura do apoio de braço | 74 cm   |  |
| Capacidade de penico     | 5 litres  |  |
| Peso                     | 14 kg   |  |
| Peso máximo autorizado   | 165 kg  |  |

### **GARANTIA**

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.

# PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 6 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

Se o dispositivo for utilizado num ambiente multiutilizador (como um lar de idosos ou um hospital), a vida útil pode ser reduzida.

NOT-UR- 01 OCTOBRE 2020 (VERSION 1.1)



Identités - ZA Pôle 49 Bd de la Chanterie 49124 Saint Barthélémy d'Anjou



Poids maximum autorisé Maximum weight authorized Peso máximo permitido 165 kg

