


Bengala

EN

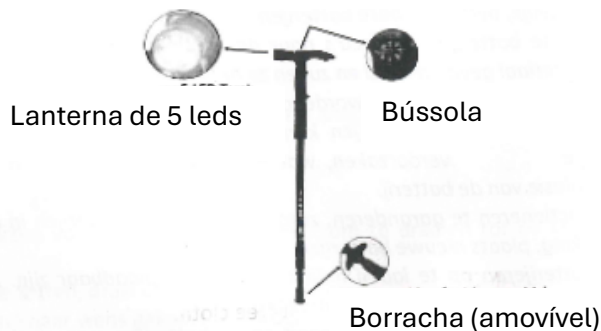

Aviso: Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o instrumento e guarde-o para utilização futura.



Instruções de segurança:

1. O aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e não a uso comercial. Utilizar o aparelho apenas como descrito neste manual de instruções.
2. Nunca tente reparar o aparelho por si próprio. Deve ser reparado pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar um choque elétrico.
3. Mantenha-o afastado de fontes de calor, como radiadores, para evitar a deformação das peças de plástico.

B. Como o utilizar

1) Colocar ou substituir as pilhas

1. Para abrir a tampa de rosca, rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Retirar as pilhas antigas e substituí-las por pilhas novas 4 pilhas de botão LR44 de 1,5 V.
3. Rode a tampa de rosca para dentro Rode no sentido dos ponteiros do relógio até meio para fechar o compartimento das pilhas.
battery compartment.



2) Regulação da altura

A bengala pode ser ajustada em comprimento através da regulação telescópica do comprimento com 2 dobras.

1. Pegar na bengala com as duas mãos. Desapertar o anel de regulação, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
2. Selecionar a regulação de 65 cm a 135 cm no máximo. Para determinar a regulação escolhida, rodar a parte inferior regulável da bengala.

Na segunda secção do ajuste telescópico, também é possível ajustar o comprimento. Verificar se a bengala está estável e segura antes de a utilizar!

B 0421 / HET3-TL

Perigo: Não puxar a bengala por cima da marcação "STOP" na parte inferior, caso contrário, existe o risco de se partir.

3) Bússola incorporada:

Com a bússola incorporada, pode sempre determinar a direção cardeal e facilitar a sua localização. Assim, saberá sempre exatamente em que direção vai.

Luz LED:

Para arrancar, basta enroscar o fecho rotativo do LED no sentido dos ponteiros do relógio até o LED se acender. Ajustar a direção.



Cuidados e manutenção:

Limpar o produto apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido, que não largue pêlos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar a unidade.

Caraterísticas:

Materiais: Alumínio 6061, polipropileno, carboneto de tungsténio, EVA, Neopreno

Accessórios incluídos: protetor de ponta, anilha, correia de pulso

Diâmetro dos fios: 14/16/18 mm - Comprimento do bastão: de 67 a 135 cm



A diretiva europeia 2012/19/CE, relativa aos resíduos electrónicos e eléctricos, exige que

não se pode deitar fora um aparelho doméstico defeituoso juntamente com o lixo comum. O aparelho usado deve ser recolhido separadamente para otimizar a taxa de recuperação e a reciclagem dos materiais e reduzir o impacto sobre a saúde e o ambiente.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com pouca experiência ou conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização deste aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com este aparelho.

Precisão e precauções sobre a utilização da pilha:

- Deitar fora uma pilha usada no ambiente ou no lixo doméstico polui e evita a recuperação de materiais reutilizáveis.
- É importante limitar o consumo de pilhas e respeitar as seguintes regras:
- Privilegiar as pilhas alcalinas (duram mais do que as pilhas salinas) e, quando possível, utilizar pilhas recarregáveis.
- Deixar as pilhas e acumuladores usados em contentores adaptados que pode encontrar em alguns retalhistas. Desta forma, os metais não poluem o ambiente e a saúde.

- A bateria deve ser inserida respeitando a polaridade indicada no aparelho e na bateria. Um posicionamento incorreto pode danificar o aparelho, causar fugas e até provocar um incêndio e a explosão da bateria.
- Para garantir um bom funcionamento, a bateria tem de estar em boas condições. Se houver algum problema, colocar uma nova bateria.
- Nunca tente recarregar uma bateria não fabricada para o efeito. Ela pode /piar, aquecer, provocar um incêndio ou explodir.
- Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo. Nunca misturar pilhas alcalinas com pilhas salinas.
- As pilhas usadas têm de ser retiradas.
- Além disso, retire a pilha se não estiver a utilizar o aparelho durante um longo período.
- Nunca tente provocar um curto-circuito no terminal de uma pilha.
- Nunca deite fora a pilha no fogo, porque pode explodir.
- Retirar o acumulador do aparelho antes de o recarregar.
- Recomendamos que um adulto assista à mudança da pilha por uma criança para respeitar estas regras.
- Se engolir uma pilha, dirija-se imediatamente ao seu médico ou ao hospital.
- Para obter o melhor desempenho contínuo, recomendamos que utilize apenas pilhas alcalinas novas e de alta qualidade.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER
(N DÉCHÈTERIE)

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !