

Finalidade:

Imobilizador da articulação gleno-umeral. Distribui o peso do braço tratado evitando a sobrecarga da zona cervical. Cintas cruzadas nas costas para melhorar o apoio.

Imobiliza a articulação do ombro em rotação interna. Controla a flexão-extensão, a rotação, a abdução e a adução do ombro. Mantém o cotovelo em flexão de 90º e em pronação-supinação intermédia.

Características:

Distribui o peso do braço tratado evitando a sobrecarga da zona cervical. Cintas cruzadas nas costas para melhorar o apoio.

Dimensões: Comprimento desde o cotovelo até à flexão dos dedos

XS: 18-22cm ;

S: 23-27 cm

Cor: Preto

Lote e Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: KSH401

Marca: KIDS

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,

Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

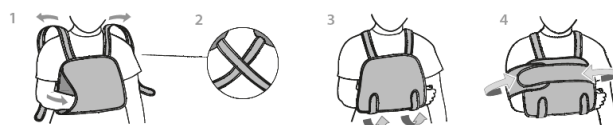
Manutenção e armazenamento:

Lave periodicamente com água morna (máximo 30º), sabão neutro e deixe secar ao ar. Durante a lavagem, colar os velcros e mantê-los fechados. Não exponha a fontes diretas de calor, como superfícies quentes, luz solar direta e outras fontes de ignição. O contato com pomadas, cremes, álcoois e solventes pode danificar o artigo. Armazenar o produto à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Indicado para Fraturas subcapitais do úmero. Fratura da clavícula, subluxação da articulação gleno-umeral, luxação acrómio-clavicular, tratamento de traumatismos do ombro e braço, pós-cirurgia.

KSH401

**Imagens do Artigo:**