

Finalidade:

Corretor Postural , respirável, indicado para casos de dor lombar leve, postura cifótica do tronco (costas curvadas) e dorso curvo na adolescência.

Características:

Duas cintas elásticas leves e respiráveis.
Fixação ajustável de Velcro®.
Sem látex

Dimensões:

S : 75-81cm
M : 81-87 cm
L : 87-93 cm
XL : 93-99 cm
XXL: 98-105 cm
3XL : 105-115 cm

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: PL210

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Os braços passam nos "anéis" formados nas extremidades de cada peça, como se fosse uma mochila , depois de ajustado às costas vem apertar à frente por baixo do peito.

Imagens do Artigo: