



GARANTIA

O produto tem garantia de 2 anos a partir da data de compra, certificada pelo recebimento ou fatura. O distribuidor reserva-se o direito de reparar ou substituir peças necessárias para corrigir defeitos no material ou na fabricação sem qualquer encargo. A garantia não se aplica a danos resultantes da não observância das instruções de operação, acidentes, abuso, alteração ou desmontagem por uso de pessoas não autorizadas. Caso você precise reparar o produto e preencha as condições de garantia, envie-o para o revendedor mais próximo juntamente com Fatura/Recibo de compra.



CERTIFICADO DE GARANTIA



Product _____


Data de compra _____

Vendedor autorizado _____

Morada _____

Vendido a _____

Morada _____

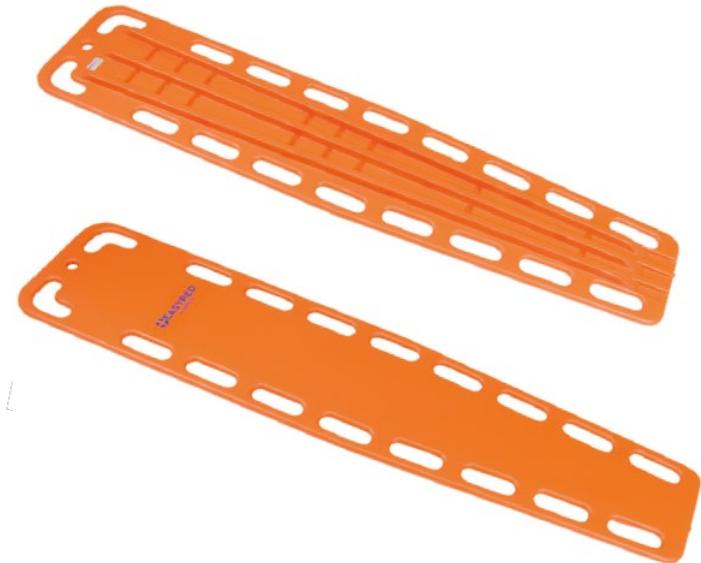

MACA / TÁBUA DE PRIMEIROS SOCORROS MANUAL DE INSTRUÇÕES

Moretti S.p.A.
INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com
Made in P.R.C.

MA eM250 01 A



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo médico de classe I
nos termos da Diretiva
93/42/CEE

Código EM250

Obrigado por comprar a **EASYRED** Maca de transferência/transporte de pacientes da Moretti. Feita de alta densidade PE, é reforçada com 2 barras de fibra de carbono, para suportar cargas pesadas peso.

Utilização prevista

Dispositivo convencional ou de resgate em água.

Características Técnicas

Tamanho: 183x42x4,4cm

Peso: 6,1kg

Capacidade de carga: 275kg

Instruções

- 1) Coloque a Maca de transferência junto ao paciente.
- 2) Transfira cuidadosamente o paciente para a Maca.
- 3) Imobilize o paciente utilizando os cintos normais ou a precintas de aranha
- 4) É possível mover a Maca de diferentes ângulos, graças às diversas alças.

AVISO

- 1) Apenas pessoal qualificado pode utilizar este produto e prestar assistência à pessoa lesada; prestar atenção, sobretudo, no caso de lesões na coluna.
- 2) Não usar este artigo para outra coisa senão o que está indicado neste manual
- 3) Moretti SpA não é responsável por usos não indicados neste manual.

Limpeza

Utilizar água e desinfetante não agressivo, secar longe dos raios solares.