

ANDARILHO DE ALUMÍNIO COM RODAS E ASSENTO AN115

Objetivo:

Um auxiliar de marcha para ajudar as pessoas que têm uma capacidade de marcha limitada.

Características:

Estrutura: Alumínio,

Punhos: TPR

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

2 ponteirass antiderrapantes

2 rodas dianteiras

Assento almofadado

Medidas: 53 x 58,5 x 88 – 97 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento / Azul

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: AN115

Marca: BMotion

Manutenção e armazenamento:

O andarilho deve ser inspeccionado regularmente para detetar sinais de danos ou desgaste. Verifique se existem:

- Danos na tubagem, incluindo quaisquer dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões de pressão gastos ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos.

Instruções de utilização:

- 1.Consulte um profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de mobilidade assistida.
- 2.Não se destina a ser utilizado em gelo ou outras superfícies escorregadias, pois pode escorregar.
- 3.Certifique-se de que os botões estão bem bloqueados na posição.
- 4.Tenha cuidado ao caminhar em terrenos inclinados/escorregadios e em superfícies irregulares.
- 5.Tenha cuidado ao andar para trás sobre obstáculos.
- 6.Nunca se sente e empurre com os pés.
- 7.Não suba ou desça escadas com o andarilho.
- 8.Não utilize o andarilho em escadas rolantes.
- 9.Em caso algum suba para o andarilho.
- 10.Cuidado ao usar saias compridas, as roupas podem ficar presas no volante

Images du produit:

Evoluxion Health, Lda

 Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

 +351 925 568 105  export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

 Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

 +34 634 058 47  comercial@greenvisco.com