

ANDARILHO DE ALUMÍNIO COM TRAVÃO DE PRESSÃO AN150

Objetivo:

Um auxiliar de marcha para ajudar as pessoas que têm uma capacidade de marcha limitada.

Características:

Estrutura: Alumínio + PVC

4 rodas dupls, travão de pressão traseiro. Punho ergonómico, apoio de costas, assento e espaço de arrumação. Regulável em altura.

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

Assento almofadado

Medidas: 64 x 50 x 77 – 91 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: AN150

Marca: BMotion

Manutenção e armazenamento:

O andarilho deve ser inspeccionado regularmente para detetar sinais de danos ou desgaste. Verifique se existem:

- Danos na tubagem, incluindo quaisquer dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões de pressão gastos ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos.

Utilize um pano seco e macio para limpar o andarilho. Mantenha o andarilho limpo e arrumado.

Deve ser guardado num local limpo, ventilado e seco. À prova de chuva, à prova de humidade e manuseado com cuidado durante o transporte.

Instruções de utilização:

A pega tem de ser instalada antes de utilizar o rollator: desaperete o botão da pega fixa, insira a pega no tubo interior do suporte pela esquerda e pela direita e ajuste-a à altura adequada para o utilizador e, em seguida, utilize o botão de cinco estrelas para a bloquear. A estrutura tem de ser totalmente aberta até todas as rodas estarem estáveis e poderem ser utilizadas.

Travar temporariamente quando em utilização: Levantar a alavanca do travão com força para travar. Estacionamento de longa duração: Segure a alavanca do travão com a mão e pressione-a com firmeza. Quando ouvir um “clique”, o travão de estacionamento abre-se.

Images du produit: