

BANCO DE BANHO GIRATÓRIO BW150

Objetivo:

Banco de banho ajustável em altura com assento giratório e pernas com ventosas antiderrapantes para proporcionar maior estabilidade.

Características:

Alumínio anodizado + PVC (cloreto de vinil)

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

4 ponteiros antiderrapantes

Assento giratório (360°)

Medidas: 37 x 37 x 46 to 56 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BW150

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

A cadeira e banho deve ser inspecionado regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

Instruções de utilização:

- 1.Certifique-se de que todos os botões bloqueiam na posição e passam pelos orifícios das pernas.
- 2.Verifique se todas as fixações estão bem apertadas.
- 3.Verifique as pontas de borracha quanto a rasgos, desgaste e substitua se necessário.
- 4.Nunca se coloque de pé no assento.
- 5.Sente-se sempre no centro do banco, não se apoie nas bordas do banco/cadeira pois pode provocar instabilidade.
- 6.Não ultrapasse o limite máximo de peso de 136kgs.
- 7.O banco/cadeira só é adequado para utilização por um utilizador de cada vez.
- 8.Não tente levantar uma cómoda pelos apoios de braços.
- 9.Aviso! Mantenha os cigarros e as fontes de calor e chamas afastadas deste produto.

Imagem do produto: