

ELEVADOR DE SANITA BW700 E BW705

Objetivo:

Elevador/Alteador de sanita ideal para prevenir dores e excesso de esforço em pessoas cuja mobilidade é reduzida. É utilizado para proporcionar uma altura extra que permita às pessoas subir e descer da sanita em segurança.

Características:

PVC com ou sem tampa
Assento ergonómico

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

Medidas: 35 x 40 x 10 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo:

BW700 - sem tampa
BW705 - com tampa

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

A cadeira deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

Instruções de utilização:

1. Para se sentar no assento elevado da sanita, desloque-se para trás até sentir o assento atrás das pernas. Utilize uma barra de apoio, se disponível, e baixe-se.
2. Quando sair do assento elevado da sanita, certifique-se de que os seus pés estão bem assentes no chão. Utilize uma barra de apoio, se disponível, e levante-se com a cabeça e os ombros.

Imagem do produto: