

Finalidade: Terapia de aerossol;

Características: Composição em PVC e acessórios em polipropeno; **Especificações Técnicas:** Fluxo do ar – 15 l/min. Livre; 0-6,8 l/min. Operativo; **Capacidade de medicação:** 2-16ml, filtroPorex substituível; **Utilização:** Uso ambulatorial e domiciliar.

Cor: Branco e Cinza

Data de produção e lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Embalagem: 1 unidade;

Dimensões: 357x196x185 mm

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Dispositivo médico de Classe III;

Modelo: LTK170

Marca: KYARA (Moretti)

Fabricante: 3A Health Care S.R.L.;

Morada do fabricante: Via Marziale Ceriti, 90F/G, 25017 Lonato del Garda (BS) - Italy,

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Instruções de Utilização:

1. Montagem das peças do nebulizador;
2. Encha o nebulizador com a solução a ser inalada de acordo com as instruções do seu médico;
3. Conecte o nebulizador com o tubo de ar ao compressor e conecte o cabo no recetáculo;
4. Coloque o botão ON/OFF na posição "I" para ligar o dispositivo e colocar o bocal da boca, ajustando a máscara sobre o nariz e boca de forma a cobri-los completamente.

Manutenção e Limpeza:

Manutenção - É aconselhável substituir o nebulizador após 100-120 aplicações, no máximo. Ou após 20 ciclos de esterilização. Verifique continuamente se o filtro está limpo e troque-o se estiver sujo ou após 70 aplicações. O dispositivo inclui filtros de reposição. Para substituir o filtro, levante a tampa do porta-filtro, retirando-o com ajuda de uma chave de fendas, remova o filtro a ser trocado e coloque o de substituição. Por fim, coloque o porta-filtro no seu lugar, certificando-se de que ele adere bem à superfície.

Limpeza – Lave todos os componentes do nebulizador, (excepto o tubo de ar) com água morna (máx. 60º) durante 5 minutos aproximadamente, se necessário adicione uma pequena quantidade de detergente seguindo as indicações de quantidade e uso fornecidas pelo fabricante do detergente. Enxague com cuidado para ter a certeza de que todos os resíduos foram removidos e deixe-os secar.

Imagens do Artigo:

