

CADEIRA SANITÁRIA DOBRÁVEL 4 EM 1 BW605

Objetivo:

Cadeira sanitária dobrável permite a sua utilização como cadeira de quarto, cadeira sanitária com bacio incorporado, cadeira de banho e como elevador de sanita. As suas pernas extensíveis permitem ajustar a altura do assento e as ponteiros de borracha anti derrapante proporcionam maior estabilidade.

Características:

Alumínio anodizado + PVC (cloreto de vinil)
+ TPR (borracha termoplástica), encartável,
ajustável em altura

Peso máximo: Utilizadores até 130 kg.

4 ponteiros antiderrapantes

Medidas: 54 x 47 x 83-93 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BW605

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

1. Limpar e desinfetar regularmente pelo menos uma vez por dia pelo pessoal médico ou pelos utilizadores e desinfetar cuidadosamente a cadeira quando mudar de doente.

2. Não entrar em contacto com ácidos ou alcalinos fortes para evitar a corrosão.

O produto deve ser armazenado a uma temperatura e humidade normais e mantido seco.

Instruções de utilização:

1. Ajustar o assento da sanita à altura pretendida, premindo o berlinde no tubo das pernas. Tenha em atenção que os berlindes das quatro pernas devem estar posicionados à mesma altura.
2. Levante a tampa do assento e coloque a sanita no assento.
3. Quando estiver a ser utilizada, a tampa do assento pode ser utilizada como encosto.
4. Após a utilização, feche a tampa da sanita e levante-a a direito do suporte da sanita.
5. A cadeira sanitária pode ser dobrada quando não está a ser utilizada, pelo que ocupa menos espaço.
6. Retire o encosto e a sanita e coloque-os sobre a sanita para serem utilizados como vedação de segurança.
7. Acrescentar um balde anti respingos, colocá-lo sobre a sanita e utilizá-lo para elevação e vedação de segurança.

Imagem do produto:



Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [✉ export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [✉ comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)