

ALMOFADA QUADRADA VISCOELÁSTICA INJECTADA EV805

Objetivo:

Almofada de assento para prevenção de escaras. Risco - Elevado

Características:

Espuma viscoelástica injetada 80Kg/m³

Capa: Tecido PU, base anti-derrapante, impermeável, fecho de correr

Frente com pega. Fixação: fecho de plástico.

Medidas: 42 x 42 x 8 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV805

Marca: GreenVisco

Manutenção e armazenamento:

Todas as almofadas vêm com uma capa amovível, que permite a sua lavagem. Pode ser lavada à mão em água fria, utilizando produtos não abrasivos ou na máquina, utilizando um programa para roupa delicada, a frio e sem centrifugação. Recomenda-se a utilização de uma rede de segurança para evitar a deformação da capa durante a lavagem. Secar na posição horizontal;

Não branquear;

Não passar a ferro.

Núcleo da almofada: Bloco com espuma viscoelástica.
-Não molhar.

Armazenar a almofada de preferência na horizontal, evitando a exposição ao sol e à humidade.

Instruções de utilização:

A almofada anti-escaras previne o aparecimento de úlceras de pressão, consequência da permanência do corpo na mesma posição por longos períodos de tempo. As úlceras de pressão surgem principalmente em zonas de proeminência óssea e pontos de apoio do corpo, como calcanhares, glúteos, ombros, joelhos, cotovelos e bacia. A pressão excessiva sobre um ponto do corpo, limita a entrada de sangue nessa zona e consequentemente de oxigénio, provocando vermelhidão, destruição da derme/epiderme e consequentemente feridas superficiais ou profundas..

Imagem do produto: