

CADEIRA SANITÁRIA E DE TRANSPORTE EVO BW655

Objetivo:

Dispositivo de assistência para a higiene e o duche. É uma ajuda técnica que permite às pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, que não podem fazer uso convencional do duche, permanecerem sentadas durante o banho. É também uma opção para melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem de incontinência.

Elevador de sanita, cadeira de banho, Cadeira de rodas interior.

Características:

Estrutura em nylon reforçado com fibra de vidro. 4 Rodas em PVC, apoio de braço elevatório, apoios de pés amovíveis.
Peso máximo: Utilizadores até 150 kg.
Assento almofadado.

Medidas: 53 x 87 x 89 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Cinzento / Azul

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BW655

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

1. Não utilize as escadas rolantes para deslocar uma cadeira de rodas enquanto o utilizador estiver sentado. Podem ocorrer lesões corporais graves.
 2. Não agarre em objectos em nenhuma das seguintes situações:
 - a. Se isso implicar que o utilizador tenha de se deslocar para a frente no assento.
 - b. Se o utilizador tiver de os apanhar do chão
 3. Uma vez ajustado o apoio para os pés, é importante verificar se a regulação da altura e da inclinação não provoca fricção entre as costas das pernas e o estofado da cadeira.
 4. Os apoios para os pés devem estar a pelo menos 65 mm do chão para evitar possíveis quedas.
 5. Os travões devem ser bloqueados quando o utilizador se senta ou se levanta da cadeira.
- O produto deve ser armazenado a uma temperatura e humidade normais e mantido seco.

Instruções de utilização:

1. Antes de utilizar a cadeira de rodas, é aconselhável aprender as técnicas para se levantar, sentar, subir e descer escadas, rampas, etc.
2. Não subir e descer escadas sem ajuda.
3. Não é aconselhável inclinar-se para a frente (para atar os sapatos, apanhar algo do chão, etc.), pois o utilizador pode cair.
4. Nunca conduzir a cadeira de rodas sobre as rodas traseiras.
5. Nunca transporte a cadeira de rodas pelos apoios de braços, pois isso pode danificar a estrutura da cadeira de rodas. Certifique-se de que os apoios de braços estão corretamente posicionados.
6. Não efetuar modificações (alterações mecânicas) na cadeira de rodas para não comprometer a sua segurança de utilização.
7. Respeitar sempre o peso máximo da cadeira de rodas de 150 Kg.

Imagem do produto:



Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [✉ export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [✉ comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)