

CADEIRA DE BANHEIRA GIRATÓRIA BW500

Objetivo:

Cadeira de banho giratória ideal para um quarto de banho adaptado às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida. É perfeita para proporcionar maior segurança na higiene diária.

Características:

Inox, alumínio e PVC com suportes antiderrapantes

Assento giratório 90° / 180° / 360°.

Encosto rebatível

Apoios de braços amovíveis

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

Medidas: 40 x 70 x 18 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BW500

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

A cadeira deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

Instruções de utilização:

Instale o assento na banheira.

Fixe o assento à banheira utilizando parafusos em ambos os lados dos assentos.

Levante a alavanca para rodar o assento e solte a alavanca para parar de rodar.

Empurre o assento ligeiramente para a esquerda e para a direita até a parte inferior da alavanca entrar no orifício da base.

Nota:

Os botões de bloqueio devidamente fixos nos apoios de braços e nos suportes do corrimão devem sair completamente dos orifícios do assento e da base.

Após rodar o assento, certifique-se de que a alavanca está fixa na base.

Imagem do produto: