

COLCHÃO DE SOLO DOBRÁVEL EV1300

Objetivo:

O Colchão de solo foi concebido para ser utilizado ao lado da cama para reduzir o risco de os utilizadores se magoarem se caírem da cama. Fabricado em espuma de alta densidade, o tapete pode ser dobrado rápida e facilmente para uma arrumação ótima e possui uma cobertura fácil de limpar que maximiza os níveis de higiene.

Características:

Espuma PU, forro em tecido Vinyl.

Revestimento exterior muito resistente, ignífugo e impermeável. Com pega para facilitar o transporte.

Medidas: Estendido: 60X182X5 cm ; Dobrado: 60x91x15 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: EV1300

Marca: EvoCare

Manutenção e armazenamento:

Lavável à mão com detergente neutro. Pode ser lavado a seco. Não passar a ferro. Não utilizar lixívia. Evitar o contacto do colchão com solventes, produtos corrosivos, decapantes e objetos cortantes.

Verificar periodicamente se o colchão apresenta um desgaste normal, como alterações no aspeto, eventuais entalhes e/ou furos. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Evitar a exposição à luz solar; evitar a humidade.

Instruções de utilização:

A sua principal função é amortecer o impacto em caso de queda de uma pessoa no chão. Altura reduzida para facilitar a utilização de cadeiras de rodas. Revestimento exterior muito resistente, ignífugo e impermeável. Com pega para facilitar o transporte.

Imagem do produto:



Evoluxion Health, Lda

 Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

 +351 925 568 105  export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

 Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

 +34 634 058 47  comercial@greenvisco.com