CADEIRA DUCHE/WC TRANSFERÊNCIA - 822052 & Geri Mais

Finalidade: Ideal para transportar pessoas com mobilidade reduzida para o duche ou sanita. Permite a recolha de um paciente sentado na cama uma vez que o assento aberto permite ser deslizado por baixo do paciente. Usando a fivela dupla para maior segurança.

Características:

Cadeira de duche/WC e transferência ajustável. Ajuste em altura através de manivela lateral. Manivela dobrável.

Fecho automático e cinta de segurança nas costas do utilizador.

Bacio amovível.

Estrutura de aço e assento em ABS

Encosto – PE moldado por sopro/espuma PU impermeável.

Pedal – Plástico robusto e durável

Pega – liga de alumínio.

Altura ajustável.

Sistema de travagem: travão de pé Peso máximo do utilizador – 125 kg

Peso – 34 kg **Dimensões:**

Gerais: L 59 x prof 70 x A 93 a 111,5 cm

Assento: L 41

Cor: Preto e branco **Lote:** Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 822052 Marca: Moovy

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior

qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Utilize detergente neutro para a lavagem regularmente. Manter limpo e seco. A cadeira não pode ser submergida em água.

Manutenção e armazenamento:

Depois de tomar banho com a cadeira, limpar a superfície com um pano macio o mais rápido possível e colocá-la numa área ventilada para manter o elevador seco. Quando o produto é exposto a fontes de calor externas, a temperatura da superfície aumenta, afetando a utilização e a segurança do produto.

Instruções de utilização:

- Abrir o equipamento em frente ao paciente que se encontra sentado direito. Levante os pés do paciente para que pousem nos pedais. Certifique-se que os travões estão acionados até que o paciente esteja sentado no equipamento.
- O paciente deve inclinar-se para a direita e para a esquerda para rodar e o lado correspondente para que o paciente fique sentado, feche a fivela de segurança na parte de trás.
- 3. Destrave os travões após todas as fivelas estejam fechadas. Agarre as pegas da frente para mover o paciente.
- 4. Destranque os travões quando o paciente estiver sentado no local desejado.
- 5. Permite a elevação através de manivela.



