


	PT	DE	NL	EN
①	Recetor	DE	NL	Receiver
②	Botão transmissor	Empfangsgerät	Ontvanger	Transmitter
③	Botão de definição	Sender	Zender	Setting button
④	Seleção da campainha	Einstellknopf	Regelknop	Ringer selection
⑤	Controlo do volume	Klingelton	Keuze beltoon	Volume control
⑥	Luz indicadora	Lautstärke	Regeling volume	Indicator light
⑦	Cordão de pescoço	Kontrolllampe	Lampje	Lanyard loop
⑧	Botão SOS	Kabelschlaufe	Lus voor snoer	SOS button

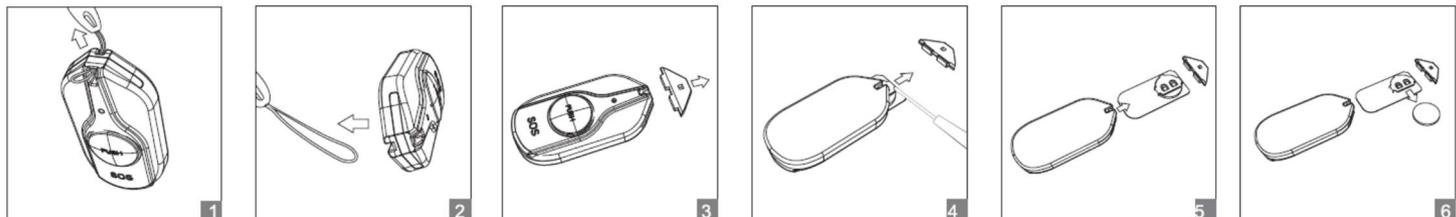

## ALARME SOS

EN



**Aviso:** Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o instrumento e guarde-o para utilização futura.

### A. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. O aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e não a uso comercial. Utilize este aparelho apenas como descrito neste manual de instruções.
2. Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na etiqueta de características.
3. Não coloque nenhuma parte deste aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
4. Não manusear a unidade ou a ficha com as mãos molhadas.
5. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar um choque elétrico.
6. Nunca tente repará-lo sozinho. Deve ser reparado pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar um choque elétrico.
7. Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície seca.
8. Não utilizar ao ar livre.
9. Mantenha-o afastado de fontes de calor, como radiadores, para evitar a deformação das peças de plástico.
10. Não utilize esponjas/panos grosseiros ou abrasivos ou palha de aço para limpar o aparelho.
11. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização deste aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

### B. COMO UTILIZAR


#### 1) Colocar ou substituir as pilhas

Para mudar a pilha, siga os passos abaixo: (ver esquema no início do manual)

- Abra a tampa das pilhas na parte superior do transmissor.
- Retire a placa de circuitos com um pequeno alicate ou pinça.
- Introduzir 1 pilha CR2032. Respeite a polaridade das pilhas.
- Volte a colocar a placa de circuitos no transmissor.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.

## 2) Instalação do recetor

Ligue o recetor à tomada eléctrica. O recetor terá um melhor desempenho se for mantido afastado de equipamentos eléctricos. Tente ajustar a localização do recetor de acordo com o “Guia de alcance”.

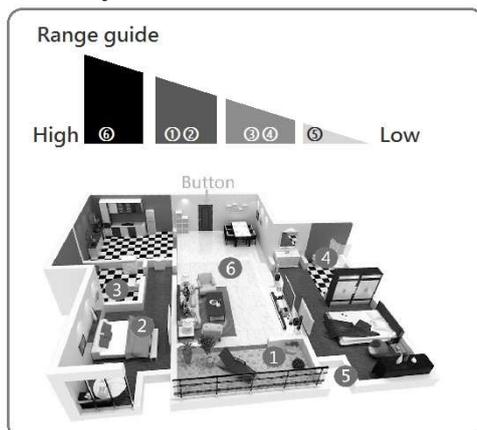

Graças ao seu alcance de 100 m, pode confiá-lo a um dos seus vizinhos, por exemplo.

## 3) Funcionamento

- Ajuste do som : Utilize o botão de controlo do volume (5) para ajustar o volume de acordo com a sua conveniência (3 níveis + silêncio).
  - Escolha da melodia: Prima o botão de escolha do toque de chamada (4) para escolher uma das 32 melodias disponíveis e, em seguida, prima o botão de definição (3) para validar e prima o button (8) no transmitter no espaço de 5 segundos para confirmar a escolha do toque de chamada. O dispositivo com função de memória, sempre que desligar e voltar a ligar o recetor, a melodia e o volume mantêm-se iguais.
- Em caso de emergência, prima e mantenha premido o botão SOS durante pelo menos 3 segundos para ativar o alarme SOS.

## 4) Sincronização do emissor/recetor

Para sincronizar o transmissor e o recetor, prima o botão set (3), o dispositivo tocará 1 time e prima o botão transmitter (8) no espaço de 15 segundos. O recetor tocará 1 vez e piscará para confirmar que o emparelhamento foi concluído. O aparelho regressa automaticamente ao modo normal após alguns segundos.

Nota: O carrilhão possui uma memória interna onde armazena os códigos dos botões atualmente emparelhados em caso de falha de energia. Por conseguinte, não é necessário voltar a emparelhar os botões após uma falha de corrente ou um corte de energia.

### C. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O recetor não toca	Certifique-se de que o recetor está corretamente ligado e dentro do alcance do transmissor. Troque a bateria do transmissor.
Sem indicador luminoso	Certifique-se de que o recetor está corretamente ligado e dentro do alcance do transmissor. Troque a bateria do transmissor.
Distância de transmissão reduzida	Estruturas metálicas ou uma moldura de porta podem interferir com o sinal. Desloque o transmissor ou o recetor. Certifique-se de que outros dispositivos eléctricos que possam interferir com a receção do sinal não se encontram perto do recetor. Desloque o recetor.

### D. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpe o produto apenas com um pano seco ou ligeiramente húmido que não largue pêlos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar a unidade.

### E. CARACTERÍSTICAS

- Material: ABS
- Recetor: 110-220V <2.0mA
- Transmissor: 1 x CR2032 3V <10mw
- Frequencia 433.92 MHz
- Potência sonora : 25dB a 110dB

- Alcance de 100 metros em campo livre
- Tolerância de temperatura : -20°C ~ 70°C



A diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos electrónicos e eléctricos exige que não se deite fora um aparelho doméstico defeituoso juntamente com o lixo comum. Os aparelhos usados têm de ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e a reciclagem dos materiais e reduzir o impacto na saúde e no ambiente.

#### **Precisão e precauções sobre a utilização da bateria**

- Deitar fora uma pilha usada no ambiente ou no lixo doméstico polui e evita a recuperação de materiais reutilizáveis.
- É importante limitar o consumo da pilha e respeitar as seguintes regras:
  - Prefira as pilhas alcalinas (duram mais do que as pilhas salinas) e, quando possível, use pilhas recarregáveis.
  - Coloque as pilhas e acumuladores usados em contentores adaptados que pode encontrar em alguns retalhistas. Nesta forma, os metais não poluem o ambiente e a saúde.
- A bateria deve ser colocada respeitando a polaridade indicada no aparelho e na bateria. Um posicionamento incorreto pode danificar o aparelho, causar fugas e até provocar um incêndio e a explosão da bateria.
- Para garantir um bom funcionamento, a bateria deve estar em boas condições. Se houver algum problema, coloque uma bateria nova.
- Nunca tente recarregar uma bateria não fabricada para o efeito. Esta pode derramar, aquecer, provocar um incêndio ou explodir.
- Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo. Nunca misturar pilhas alcalinas com pilhas salinas.
- As pilhas usadas devem ser retiradas.
- Além disso, retire a pilha se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
- Nunca tente provocar um curto-circuito no terminal de uma pilha.
- Nunca deite fora a pilha no fogo, porque pode explodir.
- Retire o acumulador do aparelho antes de o recarregar.
- Recomendamos que um adulto assista à mudança da pilha por uma criança, para respeitar estas regras.
- Se engolir uma pilha, dirija-se imediatamente ao seu médico ou ao hospital.
- Para obter o melhor desempenho contínuo, recomendamos que utilize apenas pilhas alcalinas novas e de alta qualidade.

---

#### **Declaração de Conformidade**



A Captelec declara que este produto S 0600 está em conformidade com as diretivas 2014/53 / UE, 2011/65 / UE e 2014/35 / UE O texto completo da declaração de conformidade da UE está anexado no final do folheto informativo. Esta declaração não é válida se tiverem sido efectuadas alterações ao produto que não tenham sido acordadas por nós.

In Croix, 02-2022  
CAPTELEC



**Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :**  
**CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE**



Carton et emballage papier à trier / Kartons und papierverpackung recyceln / Verpakkingsmateriaal in karton en papier te sorteren / Recycle carton and paper packaging

MAKETOP ELECTRONIC LIMITED

RM 603, 6/F, HANG PONT COMM BLDG, 31 TONKIN ST, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONGKONG

**EU Verification of Conformity**

Manufacturer: Make Top Electronic Limited

Authorized Representative: Not applicable  
(established within the EU)

Details of electrical equipment

Model Number(s): H600

Description: Wireless Doorbell

Directives this equipment

Complies with: RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU  
EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 300 220-1 V3.1.1  
EN 300 220-2 V3.2.1  
EN 62479: 2010  
EN 62368-1: 2014+ A11: 2017  
THE ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & 2015/863/EU

Technical Construction File No.: Not applicable

Year in which CE mark was affixed: 2020

Authorized Signatory: *Benice*

Manufacture	Authorized Representative (Established within the EU)	Dated of Issue 2022/2/11
-------------	--	-----------------------------

Name:	<u>Benice Zhu</u>	<u>Not applicable</u>	Place of Issue
Position:	<i>Sales manager</i>		<i>China</i>