



LOGIKO®

MA DM130_500_5_30_5_40_5_61 03 A_ITA_10-2020

ESTETOSCÓPIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1.CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO.....	PAG.3
3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE.....	PAG.4
4. ADVERTÊNCIAS	PAG.4
5. SÍMBOLOS	PAG.4
6.USO	PAG.5
7.LIMPEZA.....	PAG.5
8.CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.5
9.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG.5
10. GARANTÍA.....	PAG.5
11. REPARAÇÕES.....	PAG.6
11.1 Reparação de garantia	pag. 6
11.2 Reparação de um produto não coberto pela garantia.....	pag. 6
11.3 Produtos não defeituosos.....	pag. 6
12. PEÇAS ESPECÍFICAS	PAG.6
13.CLÁUSULAS DE ISENÇÃO.....	PAG.6

CE Dispositivo médico de classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 5 de Abril de 2017
2017 sobre dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

A linha de estetoscópios LOGIKO ECHO fabricados pela MORETTI é completa e pode ser adaptada a diferentes necessidades.

- DM130** Estetoscópio com cabeça plana de alumínio. Particularmente adequado para a medição de pressão. A cabeça pode ser facilmente inserida sob o braço do esfigmomanómetro.
- DM500** Estetoscópio com cabeça dupla de alumínio comutável, para auscultação de sons de alta e baixa frequência
- DM530** Estetoscópio com cabeça dupla de aço comutável para auscultação de sons de alta e baixa frequência **Modelo adulto**
- DM535** Estetofonendoscópio con Doble Cabezal de Acero conmutable, para la auscultación Particularmente adecuado para aplicaciones cardiológicas
- DM540** Estetoscópio com cabeça dupla de aço comutável para auscultação de sons de alta e baixa frequência **Modelo pediátrico**
- DM545** Estetoscópio com cabeça e pega plana de zinco anodizado acetinado anatómico com 3 dedos.
- DM561** Estetoscópio Rappaport com tubo duplo. Para uma auscultação precisa, sem interferência ou perda de sinal. Equipado com 5 sistemas de auscultação. Duas de membrana e três de sino, para obter sempre o máximo de acordo com as diferentes necessidades.

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher um estetoscópio da linha LOGIKO ECHO fabricado por MORETTI. A sua concepção e qualidade garantem um elevado desempenho e segurança na utilização. A gama completa de estetoscópios LOGIKO ECHO fabricados pela MORETTI foi concebida e fabricada para satisfazer todos os requisitos de auscultação. Este manual de instruções contém algumas sugestões para a utilização correcta do produto e conselhos de segurança. Recomenda-se a leitura cuidadosa do manual antes de utilizar o estetoscópio. Em caso de dúvida, contacte o seu revendedor, que poderá dar-lhe ajuda e aconselhamento.

¡ATENÇÃO!

É proibida a utilização do produto para fins diferentes dos definidos no presente manual.

- A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por quaisquer danos resultantes da utilização incorrecta do produto ou utilização diferente da indicada no presente manual.

- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações ao produto e a este manual sem aviso prévio para fins de melhoramento.



3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

A MORETTI SpA declara sob a sua exclusiva responsabilidade que os produtos fabricados e colocados no mercado pela própria MORETTI SpA e que fazem parte da família STEROSCOPIES estão em conformidade com as disposições do Regulamento 2017/745 sobre DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de Abril de 2017.

Para este fim, MORETTI SpA garante e declara os seguintes pontos sob a sua exclusiva responsabilidade:

1. Os produtos em causa cumprem os requisitos gerais de segurança e desempenho estabelecidos nos Anexos I e IV do Regulamento 2017/745.
2. Os produtos em questão NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em questão NÃO SÃO INTENDIDOS À INVESTIGAÇÃO CLÍNICA.
4. Os produtos em questão são comercializados em apresentação NON-STERILE.
- 5.
6. Os dispositivos em questão devem ser considerados como de Classe I, em conformidade com o Anexo VIII do mesmo Regulamento.
7. MORETTI SpA mantém e coloca à disposição das autoridades competentes, durante 10 anos a partir da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que prova a conformidade com o regulamento 2017/745.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código básico UDI-DI e quaisquer referências a normas utilizadas estão contidos na Declaração de Conformidade da UE que a MORETTI SPA emite e disponibiliza através dos seus próprios canais.

4. ADVERTENCIAS

- Antes de cada utilização, verificar o estado de desgaste das pontas dos ouvidos. Níveis elevados de desgaste podem causar danos no pavilhão auricular.
- Não exponha o estetoscópio a fontes de calor ou a temperaturas demasiado baixas.
- Não esterilizar por calor.
- Não mergulhar em líquidos.
- O utilizador ou paciente deve comunicar qualquer incidente grave que envolva o produto ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro onde o estetoscópio se encontra.

5. e. SÍMBOLOS

 Código do produto

 Marcação CE

 Fabricante

 Lote de produção

 Leia o manual de instruções

 Leia o manual de instruções

6. USO

Para uma utilização correcta do estetoscópio LOGIKO ECHO, certifique-se de que a tensão da mola do arco é adequada para o uso pretendido. Para reduzir a tensão da mola e evitar o aperto excessivo do estetoscópio, pegar nos tubos de proa em correspondência com a ligação com as pontas dos ouvidos e alargar suavemente a proa até à largura desejada. Para aumentar a tensão da mola e evitar que o estetoscópio não esteja na posição de auscultação, segurar o arco com uma mão em correspondência com a ligação do tubo em Y e apertar suavemente o arco com a largura desejada. Para trocar os estetoscópios de cabeça dupla, segure o tubo em Y em correspondência com a ligação à cabeça e rode-o 180° até sentir um clique.

7. LIMPEZA

Para limpar os estetoscópios LOGIKO ECHO, recomendamos a utilização de um pano macio humedecido com álcool ou uma solução neutra de água e sabão.

8. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO



Não eliminar o produto juntamente com os resíduos sólidos urbanos. Para eliminação do produto, entregá-lo a uma ilha ecológica municipal para posterior reciclagem dos materiais.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Material	Diámetro	Altura cabezal
DM130	Aluminio	45 mm	10 mm
DM500	Aluminio	45/31 mm	20 mm
DM530	Acero inoxidable	46/36 mm	23 mm
DM535	Acero inoxidable	47/36 mm	33 mm
DM540	Acero inoxidable	40/26 mm	20 mm
DM545	Zinc anodizado	46 mm	23 mm
DM561	Aluminio	45/31 mm	36 mm

10. GARANTÍA

Todos os produtos Moretti são garantidos durante 2 anos a partir da data de venda contra defeitos de fabrico ou materiais, sujeitos a quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. A garantia não se aplica em caso de danos causados por utilização indevida, abuso, alterações ou não cumprimento das instruções de utilização. A finalidade correcta do produto é indicada no manual de instruções. A Moretti não é responsável por danos, danos pessoais ou outras consequências decorrentes de erros de instalação e utilização do produto que não cumpram as instruções dos manuais de instalação, montagem e utilização. A Moretti não garante os produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: calamidades, operações de manutenção, etc.

As reparações não autorizadas, danos causados pela alimentação eléctrica (se fornecida), utilização de peças não fornecidas pela Moretti, não cumprimento das instruções de utilização, modificações não autorizadas, danos durante a expedição (que não a expedição original da Moretti), falta de manutenção indicada no manual. As peças sujeitas a deterioração não estão cobertas pela garantia se o dano for causado pela utilização normal do produto.

11. REPARAÇÕES

11.1 Reparação de garantia

Se um produto Moretti apresentar defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti pode substituir ou reparar o artigo sob garantia no endereço de um concessionário Moretti especificado ou nas suas próprias instalações. Os custos de mão-de-obra para a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se for determinado que a reparação está coberta pela garantia. Uma reparação ou substituição não renova ou prolonga a garantia.

11.2 Reparação de um produto sem garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação com a autorização prévia do Serviço de Atendimento ao Cliente da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de transporte relacionados com uma reparação sem garantia serão inteiramente suportados pelo cliente.

o do revendedor. As reparações dos produtos não cobertos pela garantia têm uma garantia de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto reparado.

11.3 Produtos não defeituosos

Após avaliação e teste de um produto devolvido, a Moretti notificará o cliente no caso de o produto não estar defeituoso. O produto será devolvido ao cliente a expensas do cliente.

12. PEÇAS ESPECÍFICAS

As peças originais Moretti são garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Para peças sobressalentes e acessórios, consultar exclusivamente o catálogo geral da Moretti.

13. CLÁUSULAS DE ISENÇÃO

Para além das especificações desta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não faz outras representações, garantias ou condições expressas ou implícitas no que diz respeito à comercialização, adequação para fins particulares, não-infracção e não-interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta.

14.

o errors. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei é limitada ao período de garantia, de acordo com os limites legais. Alguns estados ou países não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes em relação a produtos de consumo. Nesses estados e países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

o



CERTIFICADO DE GARANTÍA

| Produto _____

| Data de compra _____

| Distribuidor _____

| Rua _____ Localidade _____

| Vendido a _____

| Rua _____ Localidade _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com