

DEGRAU EMPILHÁVEL

O degrau empilhável tem 12 cm de altura e está equipado com almofadas antiderrapantes. Cada degrau pode ser montado lado a lado e empilhado um em cima do outro para formar uma verdadeira escada sólida para acesso em altura.

Utilizar 2 degraus empilhados um em cima do outro:

Retirar os 4 tampões do degrau inferior para que os 2 degraus se encaixem perfeitamente.

Guarde os tampões para utilização futura.

Utilizar degraus lado a lado:

Montar os degraus de modo a que os entalhes de um degrau encaixem por baixo do outro degrau. O resultado é uma montagem sólida e fiável.

Quer sejam colocados lado a lado, empilhados uns sobre os outros ou montados para formar uma escada formar uma escada (mínimo de 3 degraus) Os degraus empilháveis são seguros, estáveis e até 190 kg.

CUIDADO Tenha muito cuidado ao sair da banheira ou do duche.

Made in China

