

**Finalidade:**

Cotoveleira elástica adapta-se à sua atividade.

Com a Tecnologia Adaptive Stretch obtém:

EXCELENTE ELASTICIDADE, o que torna a colocação e o ajuste mais fáceis.

CONFORTO DE USO, compressão inteligente com tecido mais leve nas áreas de flexão.

MÁXIMA RESPIRABILIDADE, aumenta a sensação de conforto durante o uso.

Função Counterforce que alivia sobrecarga em inserções musculares. Suporte e estabilização da articulação do cotovelo.

Estimula a propriocepção. Compressão . Protege a fáscia muscular. Previne e limita a progressão da lesão.As almofadas viscoelásticas distribuem a compressão e criam um efeito de massagem.

**Características:**

Órtese de cotovelo feita de tecido elástico respirável.

Cobre a articulação do cotovelo.

Inclui almofadas medial-laterais feitas de material viscoelástico.

Inclui uma tira elástica que regula a tensão nos músculos.

Tecido clareado nas áreas de flexão e extensão da articulação.

Bilateral

**Dimensões:**

Circunferência do cotovelo S (22-26); M (26-30); L (30-34).

**Cor:** Cinza

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** CD102

**Marca:** Alfalastic

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

O artigo deve ser ajustado por um médico ou protésico individualmente a cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia do tratamento e vida útil do artigo.

Indicado para casos de:

Epicondilite ("cotovelo de tenista"), Epitrocleíte ("cotovelo de golfista"), Epicondilopatia crônica ou recorrente, Tendinite, Proteção durante atividades físicas que exigem esforço articular.

**Imagens do Artigo:**