

Finalidade:

Apoio do tornozelo com almofadas laterais, com cinta elástica e ajuste de velcro. Suporte para articulação do tornozelo.

Estimula a propriocepção. As almofadas viscoelásticas de compressão distribuem a compressão e realizam um efeito de massagem.

Características:

Órtese de tornozelo feita de tecido elástico respirável.

Incorpora almofadas media-laterais feitas de material viscoelástico.

Tecido leve nas áreas de flexão e extensão da articulação.

Bilateral

COMPONENTES

Tecido de malha: Poliamida: 70%. Elastano: 30%

Tecido interior da almofada: Algodão: 70%.

Poliéster: 30%

Dimensões:

Circunferência do tornozelo S (17-20); M (20-23); L (23-26).

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: TB102

Marca: Alfalastic

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

O artigo deve ser ajustado por um médico ou protésico individualmente a cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia do tratamento e vida útil do artigo. Indicado para casos de: Entorses de tornozelo. Instabilidade crônica do tornozelo. Tendinite. Derrames articulares.

Imagens do Artigo: