

SOBRE COLCHÃO DE AR TUBULAR EV520 / EV525

Finalidade:

O Kit motor e colchão de pressão alternada, projetado para a prevenção e tratamento de escaras, que podem ocorrer em todas as situações, que exigem em longo internamento hospitalar e/ou domiciliário.

Alternância da pressão a um ritmo suficiente evita a compressão vascular prolongada, que é suscetível de causar hipoxia tecidual. A pressão alternada adapta o colchão à posição do paciente.

Características:

Colchão: Peso máximo do utilizador: 135-145 Kg;

Função CPR - Permite um esvaziamento rápido em caso de emergência, facilitando a aplicação das manobras de CPR.

Dimensões do colchão: 190 x 85 x 11,5 cm;

Materiais: Célula de nylon PVC/PU, capa de nylon PVC/PU

1 Célula de reserva,

2 fichas para eliminar Tubo

Compressor (bomba):

Pressão: 30~ 110mmHg, saída de ar (5 -7 L/Min)

Compressor: Potência (110V/220V , 50-60Hz)

Libertação de ar: 5/7LPM

Tempo de ciclo: 6 min.

Lote: Ver embalagem

Data de fabrico: Ver embalagem.

Modelo: EvoCare

Ref:

EV520 – Sobre colchão de Ar Tubular + Compressor

EV525 – Bomba para sobre colchão (sem colchão)

Marca: Evoluxion

Manutenção e conservação:

Tenha cuidado ao operar este equipamento elétrico.

- Não o deixe ligado à fonte elétrica quando não estiver a ser utilizado.

- Não exponha o equipamento a humidade excessiva.

- Não utilize produtos de limpeza corrosivos, como desgordurantes industriais ou solventes acéticos.

- Não tente reajustar este equipamento enquanto estiver ligado à alimentação elétrica.

- Não manuseie o colchão com anéis ou pulseiras

Instruções de utilização:

1. Desenrole o colchão.

2. Posicione-o sobre a cama.

3. Fixe-o na cama com as abas.

4. Pendure o compressor (bomba) no final da cama usando os ganchos, ou no chão por baixo da cama.

5. Conecte os tubos de alimentação do colchão ao conector do compressor (bomba) combinando as saídas apropriadas.

6. Conecte o cabo da fonte de alimentação elétrica ao compressor (bomba).

7. Guie-o ao longo da cama até a tomada e conecte-o.

8. Pressione o botão para ligar o compressor (bomba).

9. Antes de posicionar o paciente no colchão, espere até que o colchão tenha sido totalmente inflado.

10. Selecione a pressão correspondente à morfologia do paciente:

Imagens do produto:



Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [✉ export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1,Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [✉ comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)