



LOGIKO



MANUAL INSTRUÇÕES



Distribuído em Portugal por:
Gerimais, Lda

Tel. 243 050 100
Email:apoio.cliente@gerimais.com

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Parabéns pela compra do Estetoscópio LOGIKO **ECHO**. A linha LOGIKO **ECHO** By MORETTI é sinónimo de estetoscópios concebidos e feitos para garantir um grande desempenho e superioridade acústica. Sugerimos que leia atentamente este manual de instruções antes da utilização do estetoscópio.

Este manual pode dar-lhe conselhos úteis para uma utilização correta e segura do produto. Em caso de dúvida, por favor, contacte o seu retalhista.

A linha de estetoscópios LOGIKO **ECHO** da MORETTI é uma linha de modelos completa que pode satisfazer diferentes requisitos.

1. DM130

Estetoscópio de cabeça única e plana em alumínio anodizado. É adequado especialmente para a medição da pressão. A cabeça plana pode ser facilmente inserida sob a braçadeira do esfigmomanómetro.

2. DM500

Estetoscópio de cabeça dupla, em alumínio anodizado, adequado para sons de alta e baixa frequência.

3. DM505

Estetoscópio de cabeça dupla, em alumínio anodizado, adequado para sons de alta e baixa frequência para uso pediátrico.

4. DM530

Estetoscópio de cabeça dupla, em Aço Inoxidável, adequado para sons de alta e baixa frequência.

5. DM535

Estetoscópio de cabeça dupla, em aço inoxidável, adequado para sons de alta e baixa frequência, em particular para a auscultação da cardiologia. Modelo adulto.

1. DM540

Estetoscópio de cabeça dupla, em Aço Inoxidável, adequado para sons de alta e baixa frequência. Modelo pediátrico.

2. DM545

Estetoscópio de cabeça única plana na base, acabamento em Zinco anodizado e cabeça anatômica.

3. DM561

Estetoscópio rappaport. É adequado para uma auscultação precisa sem inconvenientes ou perda de sinal. Oferece 5 modos de auscultação diferentes graças a dois tipos de diafragma e três tipos de sino.

USO

Para uma utilização correta do estetoscópio LOGIKO ECHO, ajuste a tensão de mola do auricular às suas necessidades.

Para reduzir a tensão da mola no auricular, segure cada protetor auricular na curva perto da ponta do ouvido e afaste-se gradualmente até se esticar completamente. Para aumentar a tensão da mola, agarre o auricular com uma mão onde os auriculares entram na tubagem e aperte até que a tubagem no auricular toque a outra. Repita se necessário. Para rodar a cabeça dupla, basta manter o tubo Y em correspondência com a cabeça e rode-o 180° até ouvir CLICK.

CUIDADO

Antes de qualquer utilização, controle o estado das pontas dos ouvidos. Uma vez desgastado, as pontas dos ouvidos devem ser substituídas para evitar danos no canal auditivo.

Evite calor e frio extremo. Evite esterilização a quente

Não mergulhe o estetoscópio em líquidos.

LIMPEZA

Os estetoscópios podem ser limpos com álcool ou água com sabão. Se for necessária desinfecção, o estetoscópio pode ser limpo com uma solução alcoólica isopropílica de 70%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	Material	Diâmetro da cabeça	Altura da cabeça
DM130	Alumínio	45 mm	10 mm
DM500	Alumínio	45/31 mm	20 mm
DM505	Alumínio	40/26 mm	20 mm
DM530	Aço inoxidável	46/36 mm	23 mm
DM535	Aço inoxidável	47/36 mm	33 mm
DM540	Aço inoxidável	40/26 mm	20 mm
DM545	Zync anodizado	46 mm	23 mm
DM561	Alumínio	45/31 mm	36 mm

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CEE

A MORETTI S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que todos os itens da família de produtos estetoscópios produzidos e comercializados pela própria MORETTI S.p.A. satisfazem todos os requisitos aplicáveis estabelecidos pela diretiva 93/42/CEE para dispositivos médicos.

GARANTIA

Este dispositivo tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra que é certificada pelo recibo ou fatura.

O distribuidor reserva-se o direito de reparar ou substituir as peças necessárias para corrigir defeitos nos materiais ou mão de obra sem qualquer custo.

A garantia não se aplica a danos resultantes do não cumprimento das instruções de utilização, acidentes, abusos, alterações ou desmontagem por pessoal não autorizado. Para cumprir as condições de garantia, envie o dispositivo para o retalhista mais próximo juntamente com o documento de compra.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo de dispositivo

Data de compra

Revendedor autorizado

Morada

Comprado por

Morada
