

**Finalidade:** Estetoscópio de cabeça dupla, em Aço Inoxidável, adequado para sons de alta e baixa frequência;

**Características:** Material de aço inoxidável;

**Lote:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Data de produção:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Cor:** Azul;

**Caixa:** 1 unidade;

**Declaração CE:** Diretiva - 93/42/CEE;

**Classificação:** Classe 1;

**Modelo:** DM530B;

**Marca:** Logiko (Moretti);

**Dimensões:** Diâmetro da cabeça – 46/36 mm;  
Altura da cabeça – 23 mm;

**Fabricante:** MORETTI S.p.A.;

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 – Meleto  
Reg. Imp. Arezzo 3932 52022 Cavriglia (Arezzo);

**Importador e Distribuidor:** Gerimais, Lda;

**Morada do Importador e Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Antes de qualquer utilização, controle o estado das pontas dos ouvidos. Uma vez desgastado, as pontas dos ouvidos devem ser substituídas para evitar danos no canal auditivo. Evite calor e frio extremo. Evite esterilização a quente. Os estetoscópios podem ser limpos com álcool ou água com sabão;

## Instruções de Utilização:

1. Ajuste a tensão de mola do auricular às suas necessidades;
2. Para reduzir a tensão da mola no auricular, segure cada protetor auricular na curva perto da ponta do ouvido e afaste-se gradualmente até se esticar completamente;
3. Para aumentar a tensão da mola, agarre o auricular com uma mão onde os auriculares entram na tubagem e aperte até que a tubagem no auricular toque a outra;
4. Para rodar a cabeça dupla, basta manter o tubo Y em correspondência com a cabeça e rode-o 180° até ouvir CLICK.

## Imagens do Artigo:

