

CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO CR007-41 / 43 / 46

Objetivo:

Cadeira de rodas autopropulsada e dobrável em alumínio. A cadeira de rodas foi concebida para ser utilizada em diferentes superfícies, facilitando a mobilidade do utilizador.

Características:

A cadeira de rodas com propulsão própria Bmotion é fabricada em alumínio e possui um sistema de travessas duplas para uma fácil dobragem. É muito leve e resistente.

As rodas dianteiras são robustas e têm 5 cm de espessura. As rodas traseiras medem 60 cm de diâmetro. Extração rápida das rodas.

As rodas são em material pneumático de poliuretano. Apoio de braços rebatível.

Apoios para os pés reguláveis e amovíveis. A altura do apoio para os pés regulável varia entre 38 cm e 49 cm. Material do apoio para os pés: plástico e aço.

Assento e encosto em material ignífugo e impermeável.

Plataforma do garfo e do apoio para os pés: Plástico.

41 cm	105	92,5	58,5	30	40,5	42	40,5	50	8"/20,32	24"/60,96	15,6
43 cm	105	92,5	61	30	43	42	40,5	50	8"/20,32	24"/60,96	15,6
46 cm	105	92,5	63,5	30	45,5	42	40,5	50	8"/20,32	24"/60,96	15,6

Medidas:

CR007-41 (41cm)

CR007-43 (43cm)

CR007-46 (46cm)

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul Mate

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: CR007-41 ; CR007-43 ; CR007-46

Marca: BMotion

Manutenção e armazenamento:

Durante a utilização da cadeira de rodas, esta deve ser periodicamente inspeccionada e mantida de acordo com o Manual do Utilizador.

Utilizar um pano húmido e sabão neutro.

Armazenar em local fresco e ventilado. Transporte: evitar pressões fortes, luz solar direta, chuva ou neve.

Instruções de utilização:

Facilitar/Permitir a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção. Pode ser utilizada por condução autónoma (se equipada com rodas traseiras grandes) ou com a ajuda de outra pessoa.;

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado;
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar a subida para a cadeira de rodas.

É aconselhável ter cuidado sempre que se desloca em pisos desnivelados.

Imagens do produto:

