

Finalidade:

As almofadas Anti Escaras são projetadas para serem usadas por pessoas sujeitas a longos períodos de tempo sentadas e em sêdação, com mobilidade limitada, por exemplo, usuários de cadeiras de roda. O principal objetivo é prevenir as úlceras de pressão nos tecidos superficiais e criar conforto.

Indicada para prevenção de Escaras, Úlceras de Pressão, proporciona estabilidade, alcança uma distribuição homogênea das pressões. Ajuda a manter a postura e absorver os impactos.

Características:

Cobertura com alguma resistência ao fogo. Possui uma pega para facilitar o manuseamento da almofada. Não desliza sobre o assento. Resistente ao desgaste. Fácil de limpar. Capa ignífuga (tipo M1). Fecho de velcro num dos lados.

Dimensões: largura x comprimento x altura em cm:

40X40X6

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: CA140

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A Almofada vem com um invólucro exterior de tecido lavável e zipper. Deve ser lavado á mão com sabão neutro e água. Não use solventes ou qualquer produto químico que poça prejudicar as propriedades do material. O contacto com pomadas, cremes, e álcoois, podem danificar a peça.

Instruções de utilização:

A Almofada deve ser colocada sobre o banco e as nádegas do utilizador, deixando a base deslizamento na parte inferior (em contacto com a cadeira)

As alças laterais facilitam o transporte e manuseio do mesmo.

