

Finalidade: Auxiliar de mobilidade servem para aumentar o tamanho de uma base de apoio individual.

Características: A axila e o cabo têm formato anatômico e são feitos de material PU durável. As pontas são projetadas com um sistema especial antiderrapante. Altura ajustável a cada 2,5 mm. Axilas ajustáveis. Alça ajustável a cada 38 mm.

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: cinzento

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP710

Marca: Mopedia

Dimensões: Ajustável 114 a 134,3 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios. se precisar de desinfetar o dispositivo, utilize um limpador de desinfetante comum.

Instruções de Utilização: Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas. Verifique se o dispositivo está montado corretamente. Tenha cuidado extra em superfícies molhadas e escorregadias. NÃO utilizar com doentes que excedam o peso indicado no rótulo do produto e no capítulo das características técnicas do presente manual. Evite deixar o aparelho em contacto com a água por longos períodos de tempo. Verifique periodicamente a sua robustez, a estabilidade e as pontas de borracha estão em boas condições. Substitua-os uma vez desgastados. Em caso de dúvidas sobre a utilização, ajuste ou manutenção, contacte o seu revendedor. Mantenha-o longe das crianças para evitar eventuais riscos.

Imagens do Artigo:

